

色味を調整したい

**注意：アールエフオリジナルソフトでの調整方法です。
それ以外のソフトは対象外です。**

■ 画像調整方法

調整前



調整後



撮影画面の右側にある「調整」をクリックしてください。



青枠部分「画像の調整」タブをクリックし、各種項目を調整してください。

■ 調整参考数値

明るさ：100、コントラスト：50

色合い：50、鮮やかさ：40

鮮明度：0

※モニタなど環境によって異なります

「OK」をクリックすると設定が反映されます。

※ PCごとに設定が必要です。

※ 「ビデオデコーダー」「Video Image」タブは使用しません。

※ PC交換や、修理などでUSBの差込口を変更した場合は再調整が必要になります。

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

■ 当社スタッフによる遠隔操作を受ける場合

パソコンがインターネット接続されている場合、当社スタッフによる遠隔操作が可能です。専用のソフトをダウンロードいただき、サポートセンターまでお電話ください。

[遠隔サポート用ソフトDL](#) ※クリックでダウンロードが始まります

■ フォームから問い合わせる場合

[お問い合わせはこちら](#)