


透 析

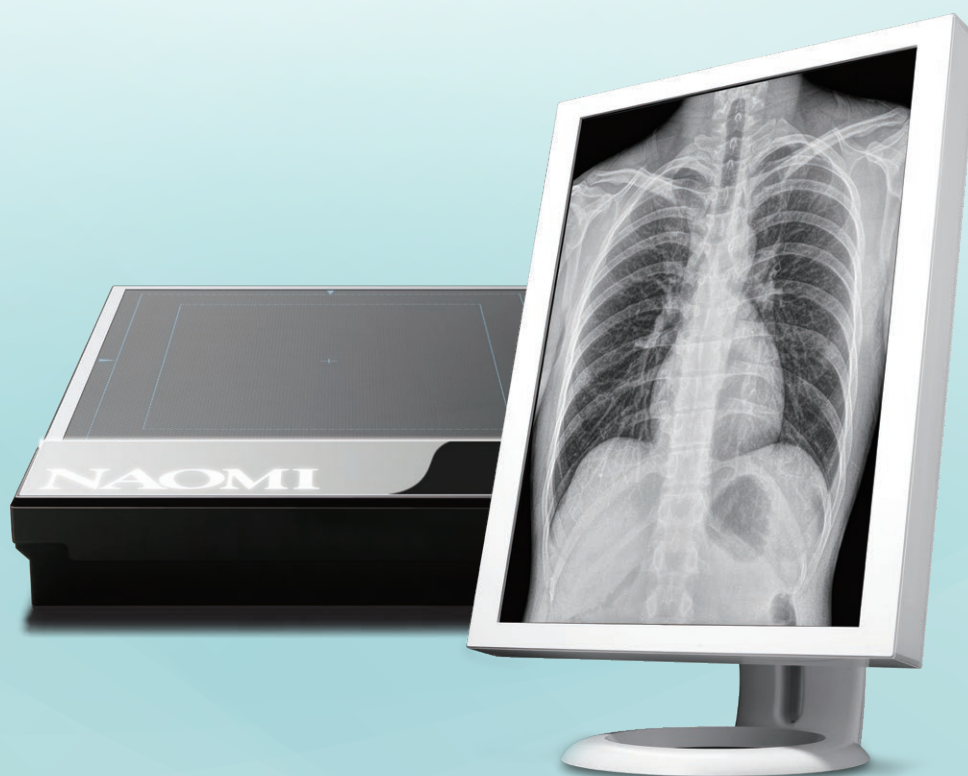

多忙な透析クリニックの
負担を大幅に軽減。

すぐ撮れる

すぐ診れる

ラクラク自動保存



※自社調べ

フルデジタルのレントゲン
デジトゲン

NAOMI
Direct Digital Radiography CCD Imaging Sensor


心 胸 郭 比 計 測 を よ り 簡 単 に。

今まで手間がかかっていた心胸郭比計測を瞬時に計測。同日撮影リスト表示により、まとめて計測することも可能に。
また、電子カルテと連動させて、患者情報を一括管理することもできます。




① 心胸郭比計測

計測したい部位を心臓の幅、胸郭の幅の順番にクリックするだけ。自動で心胸郭比が計測されます。

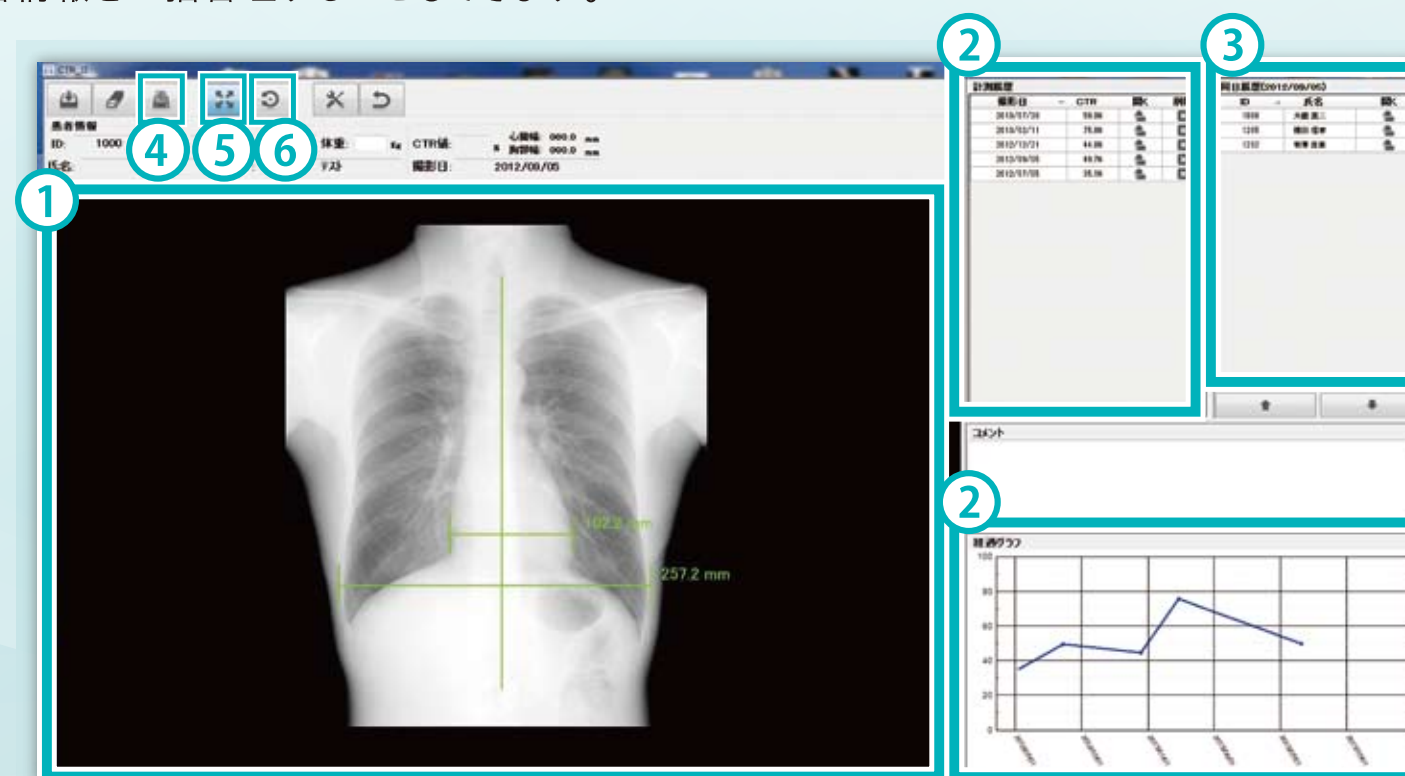

⑤ 拡大/縮小

計測された部位をマウス操作で簡単に拡大/縮小します。

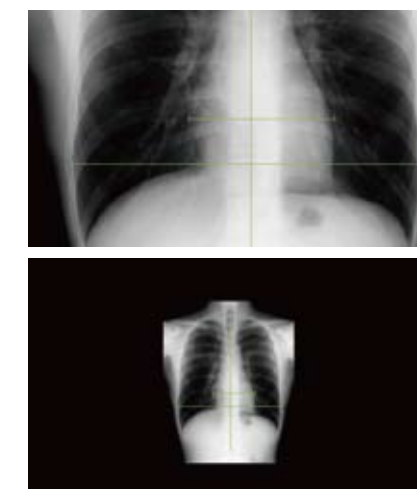

② 時系列表示


患者さんごとの心胸郭比計測データをリストとグラフで表示。患者さんの経過観察を、より分かりやすく捉えます。

③ 同日撮影リスト表示

同じ日に撮影した患者リストを一括表示。患者さんの切り替えもワンクリックで行えます。診療後にまとめて行っていた心胸郭比計測にかかる時間を大幅に短縮します。

④ コメント入力

プリントボタンをクリックするとコメントをつけて保存・印刷ができます。

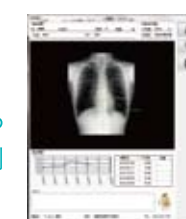

⑥ 画像回転

右回り/左回りに画像回転します。
※計測線は回りません。




より診断効率をアップさせる 多彩な編集機能

拡大縮小/ネガ・ポジ反転/強調処理/シャープネス/画像検索機能/各種計測機能など



画像比較

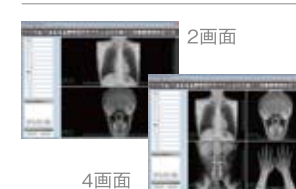

ネガ・ポジ切替




局部拡大




ラクラク マウス操作

コントラスト調整
スクロールボタンを上下に回転させるとコントラスト調整ができます。

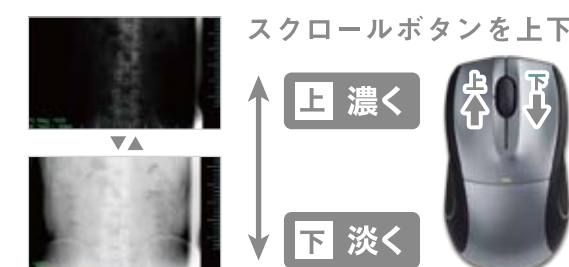

撮って、すぐ診る

いつでも安定した画像を撮影、即確認。

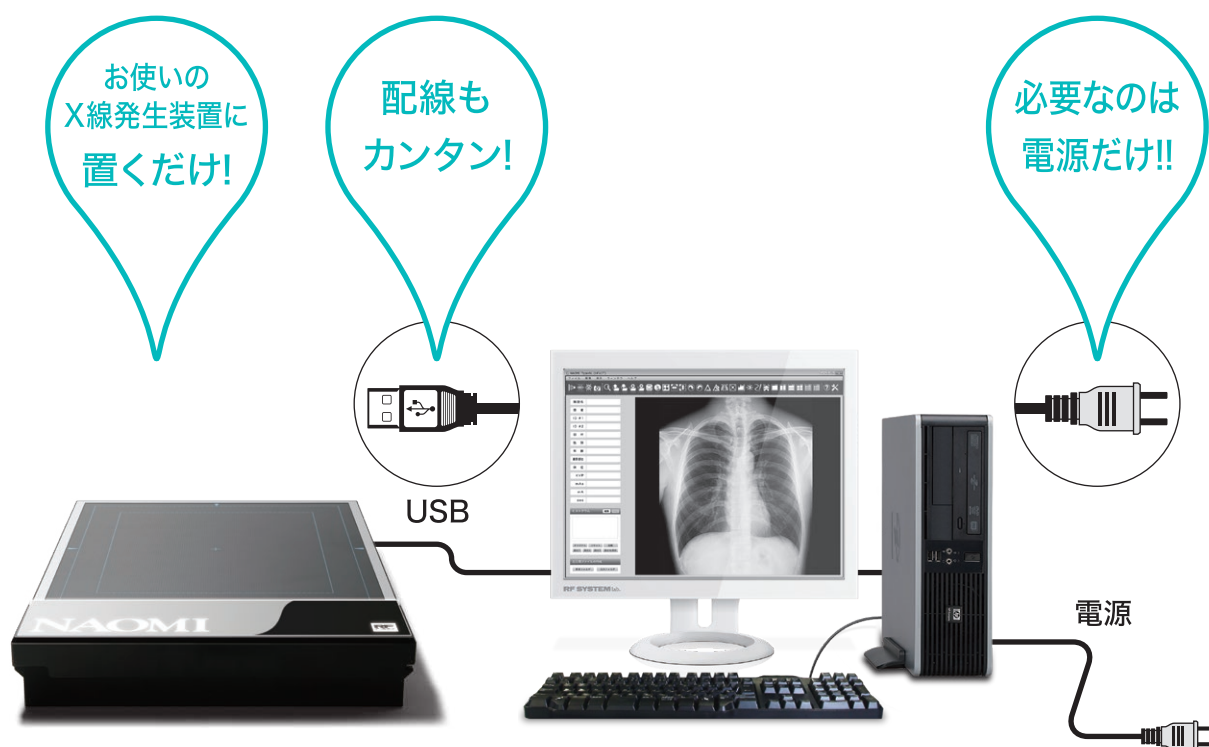

現像不要

フィルム管理不要


CRの様な大がかりな機器不要

他社システムとの連携 心胸郭比計測データ送信対応／患者情報連携対応／ビューアー連動対応／オーダーリング対応

撮 影


STEP1 X線を照射

X線発生装置

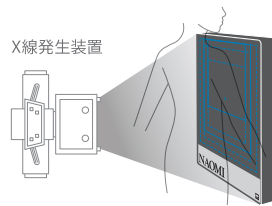

わずか
~25秒


STEP2 画像表示

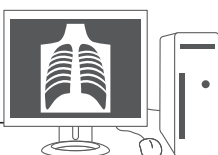

フォトタイマー機能で撮影も可能です。※レントゲンメーカーへ調整を依頼する必要があります。

指一本で 持ち上げるような感覚

NAOMI専用立位スタンドの「クイックハンドル」で、抜群の操作性と誤操作防止を実現。高さ調整、縦・横回転も思いのまま。

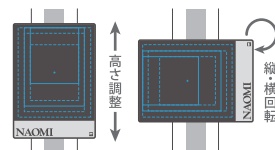

※縦・横回転機能については別途ご相談ください。

オプション品



TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089

www.rfssystemlab.com アールエフ 本社 〒380-0935 長野市中御所岡田町3 TEL:026-225-7711 FAX:026-225-7717

〔営業日〕 水～日曜日・祝日 11:00～19:00 〔定休日〕 月曜日・火曜日・祝日の翌日
※ 店舗定休日の電話受付は長野本社となります。※ 時間外でのご来店はご相談ください。
フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の弊社宛にお掛けください。

Jm_140606_N_YK_toseki_clg

