



CTビューワー

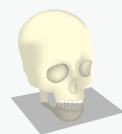

AXIAL (軸上面) 画面



SAGITTAL (矢状面) 画面

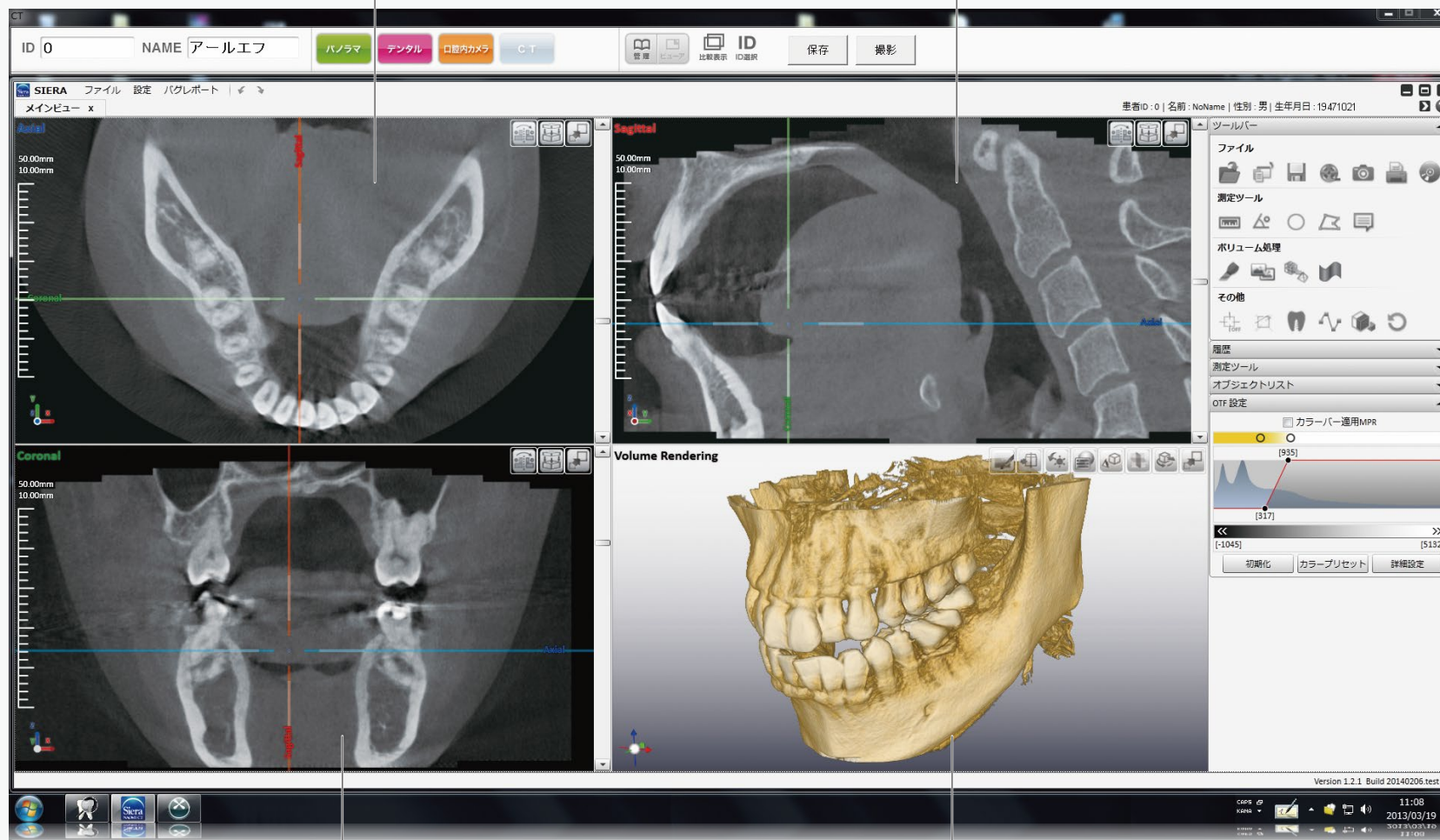

CORONAL (冠状面) 画面

VR画面


メインビュー (4分割) 表示

CT 画像は、3 次元画像と断層図で表示されます。



シエラ 専用CTビューワー [NAOMI-CT Siera] NEW

「NAOMI-CT Siera」は、従来の機能に加え、診断に役立つ様々な機能を新たに追加。直感的な操作性を追求し、多機能でも簡単にCT診断が行えます。

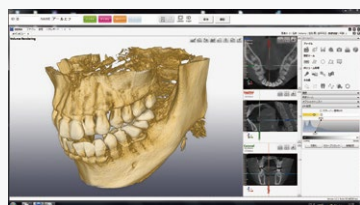



パノラミック表示

パノラミック表示 (FPDパノラマ)

口腔内全体を把握できます。断面に厚みを持たせ、一般のパノラマ画像と同じように奥行きのある画像を表示することもできます。

※ [パノラマ専用機] または [CT+パノラマ複合機] では、通常のCCDパノラマ撮影が可能です。

XZ数値を入力し断面の厚み調整可

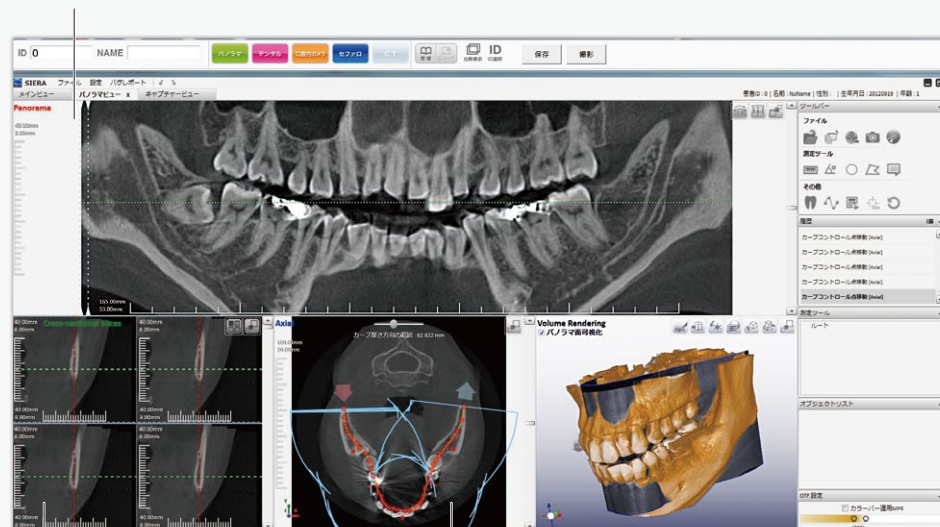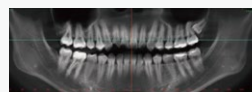

クロスセクション画面

クロスセクション (断面図) により、位置関係を確認できます。スライスの幅は任意に調整できます。

AXIAL画面


選択したラインでパノラミック表示に展開できます。赤い点を移動するとカーブを調整できます。

メタルアーチファクトを軽減

アーチファクト (X線吸収率の高い金属などの物質を撮影した際にあらわれるノイズ) を撮影時に自動で軽減します。

簡易シミュレーション


インプラントの埋入のイメージなどの説明に使用できます。

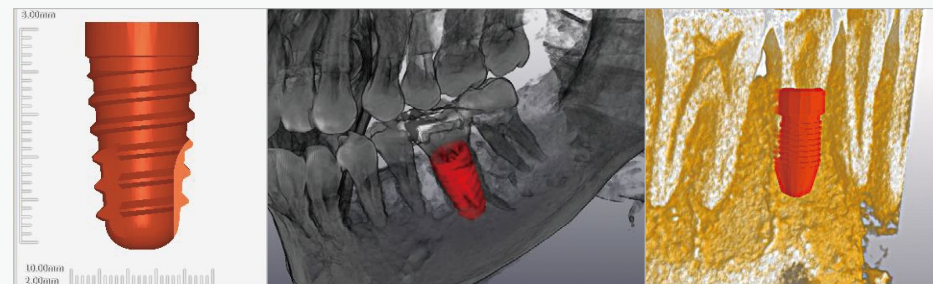

MPR画面・VR画面で位置や角度を3次元で確認


スカルプティング

VR画像から任意の部分削除することができます。

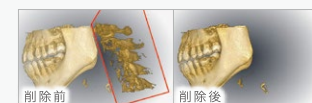


ズームキューブ

VR画像の任意の範囲を拡大して表示することができます。

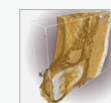


カナル描画

観察する断面の指定や、インプラント施術時に下顎管をマークするなど、マウスで簡単に描線できます。

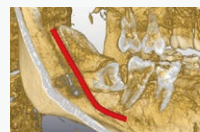

各種測定

距離や角度の計測、骨の密度や硬さを表す骨密度プロフィールなど、撮影した画像から計測ができます。

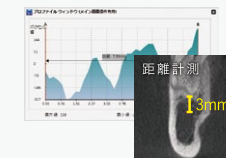

録画機能

3Dプリンターデータ出力 (STL作成)

プリントアウト機能

CDへの出力可能

インプラントシミュレーションソフトへ出力可能

各メーカーのインプラントシミュレーションソフトに合わせたスライスピッチに調整可能。DICOM (医療用汎用フォーマット) 形式での出力ができます。