## はじめに、フォルダ内の [start.hta] または [start] をダブルクリックしてください。





1.「OSのバージョンの確認」で、「はい」を選択。



 「OK」をクリックすると ドライバのインストールが開始されます。





3. 画面の表示に従って、インストールします。



	Installation Complete Setup was completed successfully.	
Show details		
eMPIA Technology Inc.		

4. 「Install」をクリック

5. 「Close」をクリック

6. 「USB Morse TypeS ドライバー」の インストールが完了しました。 「戻る」をクリックします。



	221	
シインストールしますか?		
nology Inc, サウンド、ビデオ、およびゲー」 IPIA Technology Inc.	עב א	
ology Inc." #601/75977	1221-14(1)	インストールしない(N)
oby the population	is a may	
	ビインストールしますか? nology Inc、サウンド、ビデオ、およびゲー」 PIPA Technology Inc. ology Inc." からのソフトウエア	ビインストールしますか? nology Inc, サウンド、ビデオ、およびゲームコン IPIA Technology Inc. ology Inc." からのソフトウェア インストール(1)

	山腔内カメラ トライハ インストーラ
	Morseドライバのインストールが完了しました。
high	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。
Bon	今、このコンビュースにアイバースを接続できます。アイバイス「1486の13097音7かめる78 合は、最初度过取用書をお読みべたさい。
P	ドライバ名 状態
	✓ eMPIA Technology Inc 使用できます
Y	✓ eMPIA Technology (US 使用できます
	==z/0) 27 to\#1
	< (KO(D) 763 +V/C/V



4. Morse ドライバのインストールが 開始されます。 「次へ(N)」をクリックします。



5. インストール完了のメッセージが、 表示されたら、「完了」をクリックして、 インストールを終了します。

- 6. 「USB Morse Type S ドライバ」の インストールが完了しました。 「戻る」をクリックします。
- ※既にソフトインストール済みの場合は これで終了です。

## NAOMI-DPX ソフトウェアのインストール



 「②ソフトウェアをインストールする」を クリックします。



1.「詳細情報」をクリックします	2.「実行」をクリックします
Windows によって PC が保護されました	Windows によって PC が保護されました
Windows SmartScreen は認識されないアプル記動を得止しました。このアプル実行すると、PC に問題が起こる 可能性が知ります。 研想情報	Windows SmartScreen は影响されないアプリの記録を停止しました。このアプリを実行すると、PC に同胞が起こる 可能性が知力す。
	発行元: RF CO LTD アプリ: setup.cee



- 「次へ」を押してNAOMIドライバーを インストールします。
- ※ NAOMIドライバ ーインストール

   → DXドライバー インストール
   → NAOMI-DPXソフトのインストールの順で進みます。
- 3. 「完了」を押してNAOMIドライバーの インストールを終了させます。
- NAOMIドライバーのインストールが完了すると DXドライバーをインストールします。 インストールは自動で終了します。

1	NAOMI-DPX セットアップ	×
次のコンポーネン	パトがコンピュータにインストールされます:	
Visual C++	ランタイム ライブラリ (x86)	
これらのコンポ・	ーネントをインストールしますか?	
[キャンセル] を遠	蟹ぶとセットアップを中止します。	
	インストール(0 キャンセル(C)	

 NAOMIドライバとDXドライバの インストールが完了すると NAOMI-DPXソフトの インストールが行われます。 「インストール(I)」をクリックします。

 

 別AOMI-DPX セットアップウィザードへようこそ
 ×

 NAOMI-DPX セットアップウィザードへようこそ
 ジンジン

 インストーラは NAOME-DPX をインストールするために必要な手順を示します。

 この製品は、著作権に関する法律れよび国際条約により保護されています。この製品の全部 または一部を無助で複製したり、無助で複製物を頒布すると、著作時齢の浸着となりますのでご 注意くたさい。

 キャンセル
 < 戻る(B)</td>
 次へ(N) >

遢	NAOMI-DPX	-		×
インスト	ール フォルダの選択			
インストーラ このフォル4 ルするには	がは次のフォルダへ NAOMI-DPX をインストールします。 ダビインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の: 、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。 EV	フォルダは	:インス	./
O¥Proer	 am Files (x86)¥RF¥NAOMI-DPX¥	<u>参</u> ディス・	照(R). ク領域	(D)
NAOMI-I	DPX を現在のユーザー用か、またはすべてのユーザー用にインスト・ での ユーザー(E)	-ルします:		
ಂದಂ	ユーザーのみ(M)			
	キャンセル < 戻る(B)		ኢላ()	0>

**6.** 「次へ(N)」をクリックします。

**7.** 「次へ(N)」をクリックします。



 NAOMI-DPX
 - □ ×

 インストールが完了しました。
 ジンシントールが完了しました。

 NAOMI-DPX は正しくインストールはれました。
 ※? するには、「閉じる) をクリックしてください。

 Windows Update で、NET Framework の重要な更新があるかどうかを確認してください。

 キャンセル
 〈 戻る(B)

 開いち(c)



**8.** 「次へ(N)」をクリックすると インストールが始まります。

 「閉じる(C)」をクリックして インストールを完了させます。

**10.** DPX ソフトウェアのインストールが 完了しました。

「閉じる」をクリックして終了します。