

Windows10パソコンをご使用の場合 下記設定を行ってください。

BORESCOPE.exe のプロパティ用設定変更の方法

■_BORESKOPE.exeの保存場所

パソコンの電源を入れ、デスクトップ上のコンピューターをダブルクリックします。



下記フォルダを順番にクリックしていきます。

Cドライブ → Program Files (x86) → RF → NAOMI-DPX


※Program Files (x86)フォルダが無い場合はCドライブ → Program Files → RF → NAOMI-DPX

■_BORESKOPE.exeのプロパティ内の設定を変更します。

手順: NAOMI-DPXフォルダ内の「_BORESKOPE.exe」を右クリックし、プロパティを選択、「互換性タブ」を開きます。

注意: "BORESKOPE"の前にアンダーバー"_"が付いている方です。

- ① 「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェックを入れ、「Windows 8」を選択
- ② 「カラーモードを制限する」にチェックを入れ、「16ビットカラー」を選択
- ③ 「適用」 → 「OK」をクリックします。

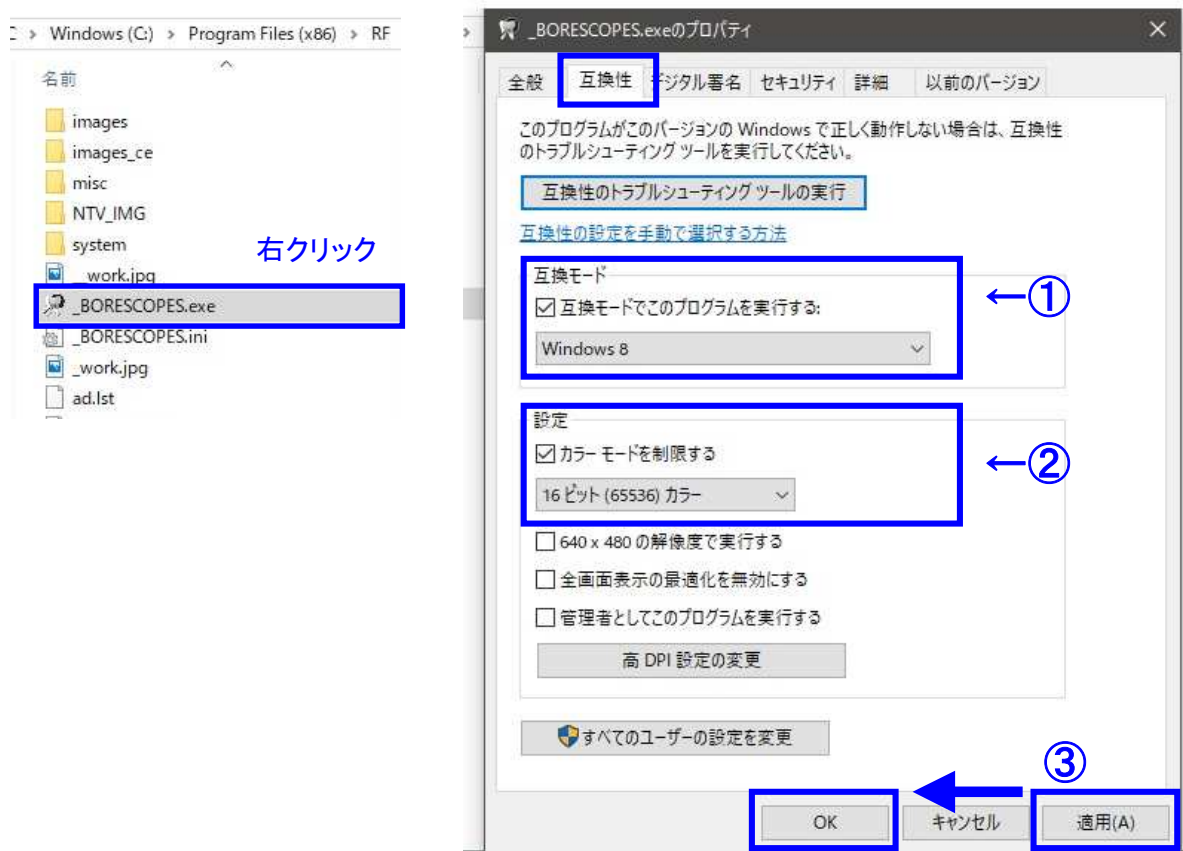

手順は以上で終了です。

上記設定を行わないと、口腔内カメラ ライブ表示画面が真っ白になることがあります。
Windows10パソコンご使用の場合、ソフトインストール後に必ず実施してください。