


1. PCに dotNet Framework 3.5 がインストールされているか確認する方法

※対象OS Windows 8/8.1/10

- ① コントロールパネルの「プログラムと機能」の左メニュー
「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリック



- ② 「Windowsの機能」が表示される。

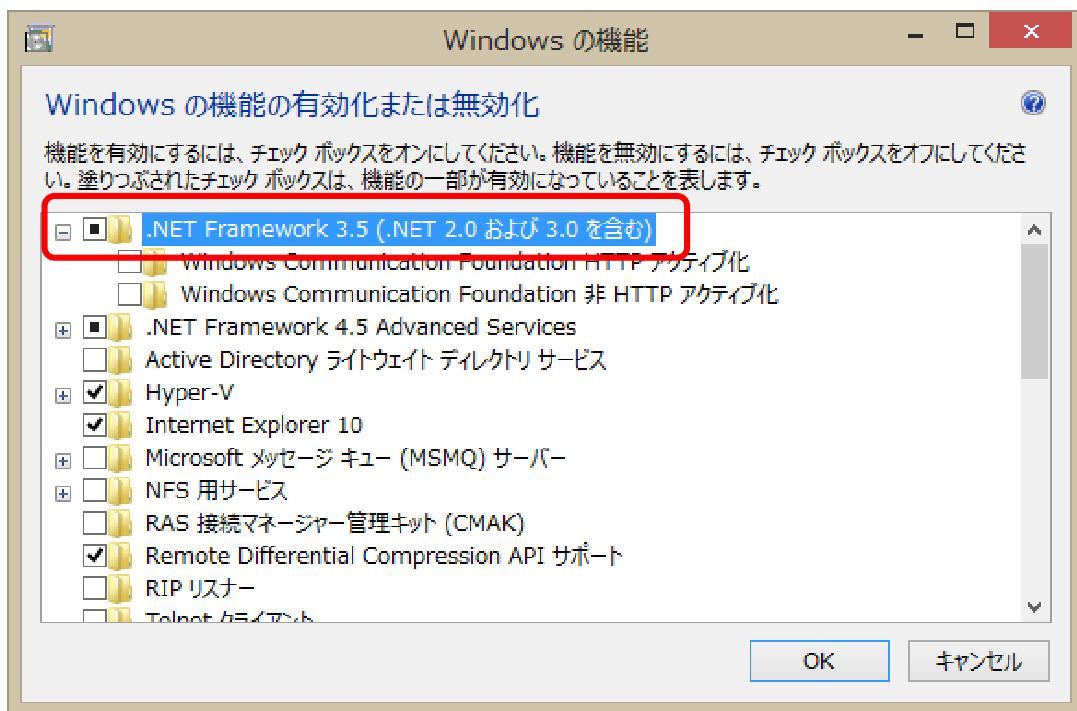

ここで上の図のように、「.NET Framework 3.5～」の左のチェックボックスに
下記のように黒い四角が表示されている場合、dotNET Framework 3.5 はインストール済みです。



→ 当社ソフトのインストールが可能

下記のように、白い四角の場合は dotNET Framework 3.5 はインストールされていない。




→ 当社ソフトのインストールができない状態です。

※ dotNET Framework 3.5 をインストールしてください。


2. dotNet Framework 3.5 をインターネット経由でインストールする方法

※PCがインターネットに接続されていることが条件です。

- ① 「Windowsの機能」で「.NET Framework 3.5～」の左側のチェックボックスをクリックし黒い四角の表示にする。

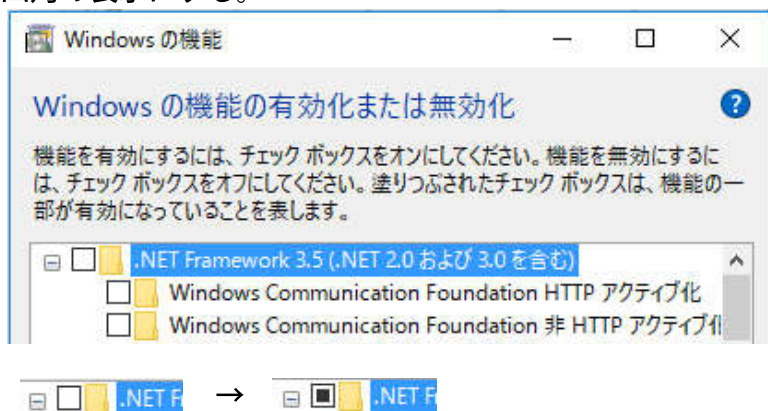


- ② 「OK」をクリックする。

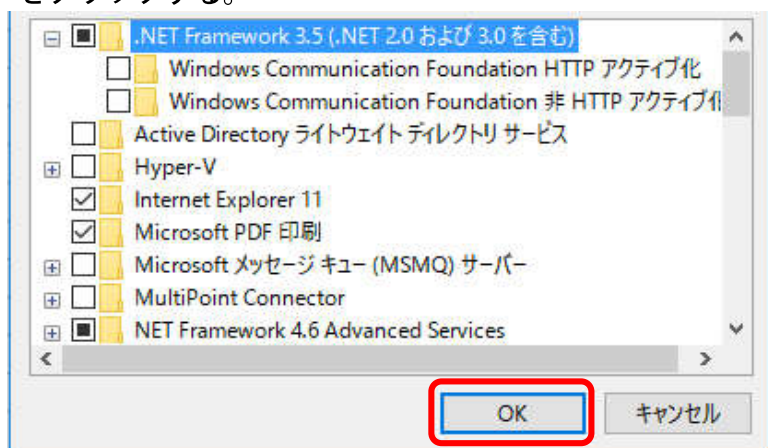


※後は自動的にインストールされます。

※PCの状態によっては、失敗する場合があります。

- ③ 「一部の機能のインストールを完了するには、Windows Update でファイルをダウンロードする必要があります」と表示されたら [Windows Update でファイルを自動ダウンロードする] をクリックします。

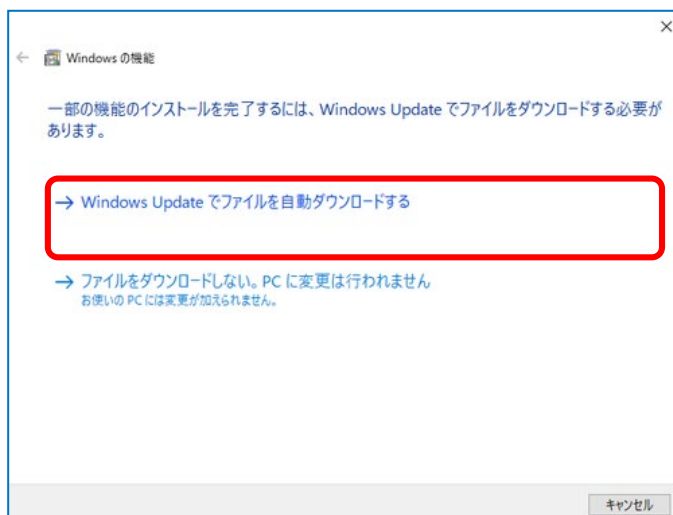

「必要な変更が完了しました。」と表示されたら [閉じる] をクリックします。

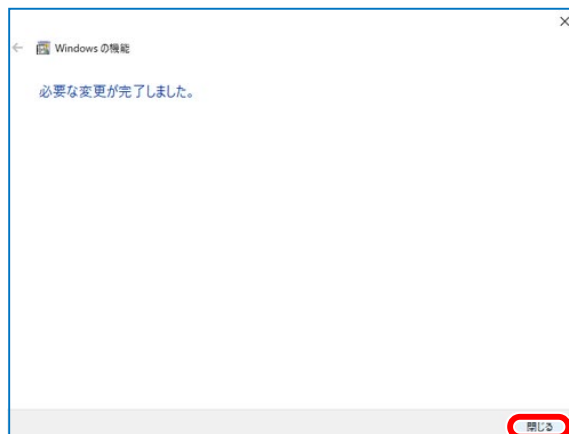

.NET Framework を必要としていたソフトウェアが実行できるようになったか確認します。