




【Wi-Fi対応】口腔内カメラ (Wi-Fi lumica) ソフト・受信機ドライバーインストール(ダウンロード)手順

※対応OS: Windows7～11

サーバーパソコン/クライアントパソコン、初めて医科NEXTをインストールする場合/現在、医科NEXTをご利用中の場合で方法が分かれるので状況に合わせて設定を進めてください。



〈フローチャート〉

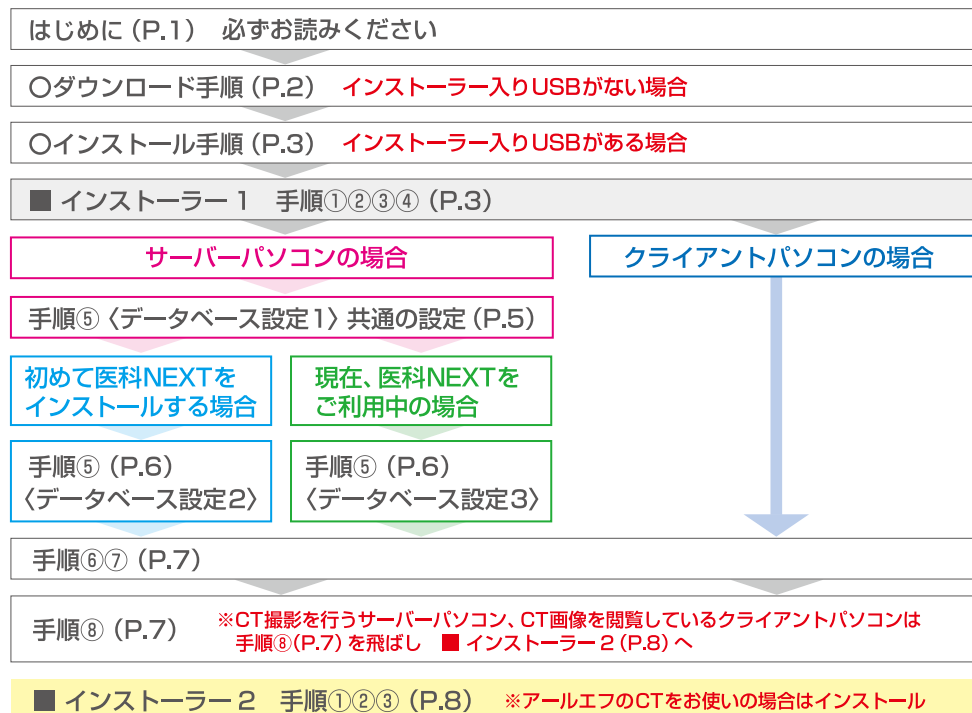

はじめに

USBメモリ (カメラソフトインストーラー入り) をお持ちの場合は

「○インストール手順 (P.3)」からご対応ください。

無い場合は、「○ダウンロード手順 (P.2)」に従ってアールエフのホームページからダウンロードしてください。 ※USBメモリは【Wi-Fi対応】口腔内カメラ 初回販売時のみ 同梱されます。



注意

- ・カメラをご使用前に、必ず本紙手順でソフトウェアのインストールを行ってください。
- ・画像閲覧ができなくなる場合がありますので、**カメラ使用の有無を問わずアールエフのソフトをご使用中の全てのパソコンでインストールを行ってください。**
- ・他社サーバーパソコンにはインストールしないでください。
- ・ソフトのインストールにあたり生じた不具合については、当社ではその責任を負いません。
- ・Windows7をご使用の場合は、Wi-Fi受信機のドライバーが自動でインストールされません。付属の「Wi-Fi受信機 & NEXTソフト取扱説明書」トラブルシューティング (P.25) を参照いただきドライバーをインストールしてください。


○ダウンロード手順 インストーラー入りUSBがない場合

1. 検索サイトで「アールエフ」と検索、またはブラウザにアドレス「https://rfsystemlab.com/」を入力します。
2. ホームページ中段の **製品サポートはこちら 電話の前に☎** をクリックし、「簡単サポート」ページへ移動します。
3. 開いたページ下段ソフトダウンロードより「**【Wi-Fi対応】口腔内カメラ・受信機用ドライバー**」をクリックしダウンロードページへ移動します。




4. 医科 NEXTソフト用の

「**医科 ドライバー & ソフト インストーラー 1 ダウンロード**」をクリックしてダウンロードを行ってください。
※アールエフのCTをお使いの場合は「**医科 ドライバー & CTソフト インストーラー 2**」もダウンロードしてください。

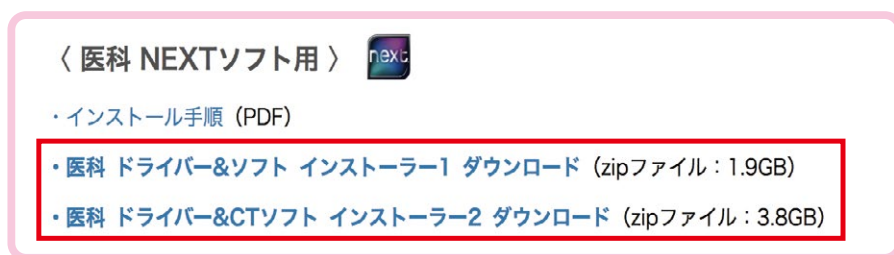


エッジ または Google クローム をご使用の場合は「**ダウンロードフォルダ**」へ保存されます。
※お使いのブラウザソフトにより操作が異なる場合があります。

5. 「PC」を開き「ダウンロード」をクリック ⇒ 「インストーラー 1」を右クリックし「**すべて展開 (T)...**」を選択します。
※パソコンにより表示項目や形が異なります

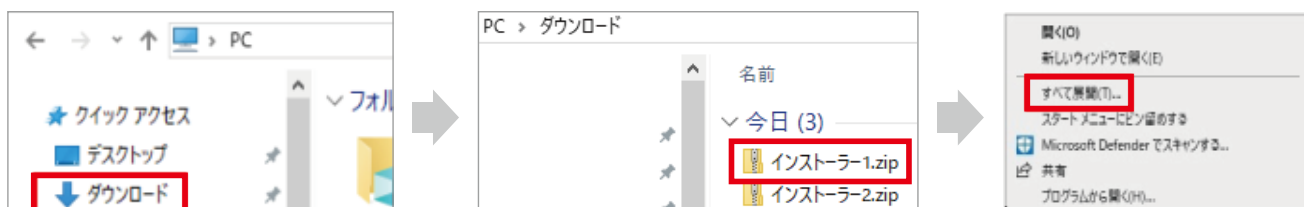

6. 開いてくる画面「**圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開**」画面内、「**展開 (E)**」をクリックしてください。

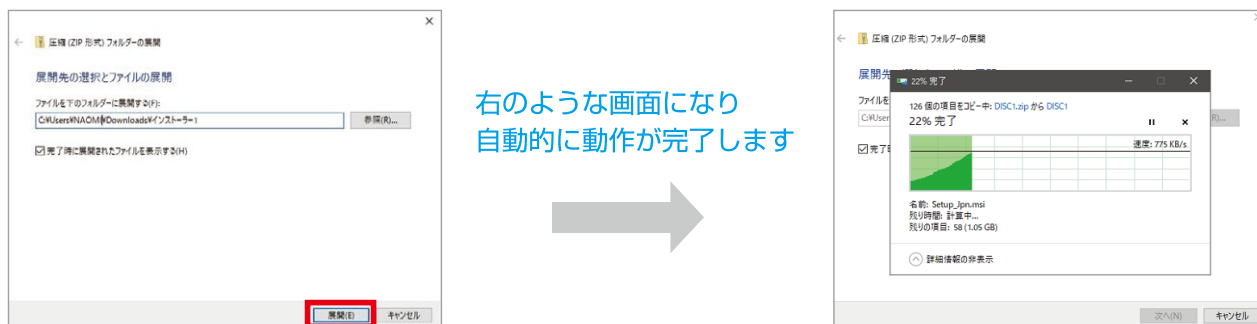


7. 展開後、表示されたフォルダ内の「**インストーラー 1**」をダブルクリックしてフォルダの中身が表示されたら「**インストール手順 (P.3)**」の手順②から進めてください。
8. CTをお使いの場合は「インストーラー 2.zip」も「**ダウンロード手順 5 ～ 7**」までと同様に進めてください。

○インストール手順（あらかじめUSBメモリをパソコンに挿しておいてください）


※操作案内時の画面の表示は、パソコンによって異なる事があります

■ インストーラー 1

手順①： 「PC」から「RF-USB」を開き、「インストーラー 1」を開きます。

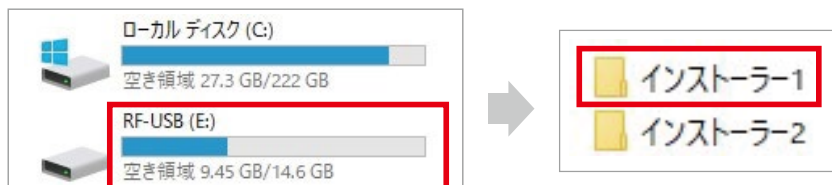

手順②： 「start.hta」をダブルクリックしてソフトを起動します。

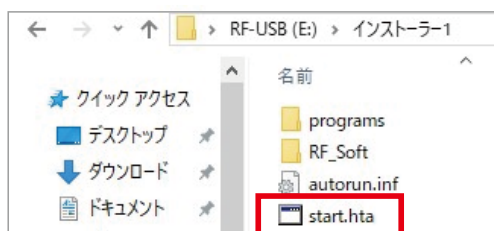


PCによっては
「start」のみ記載の
場合もあります

※下記のような画面が表示される事があれば
「実行(R)」をクリックして進めてください



手順③： 起動した画面から「ソフト・ドライバーのインストール/更新を行う」をクリックしてください。

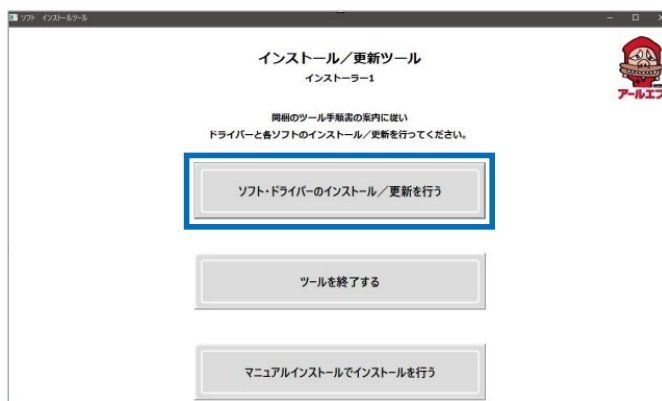

手順④： 「サーバーパソコン(親機)」または「クライアントパソコン(子機)」をクリックしてください。



サーバーパソコン(親機):

アールエフの製品をご使用中の場合はCT及びパノラマ撮影を行うパソコンが該当します。それ以外の環境の場合は、データを保存するパソコンをサーバーとして設定してください。

クライアント(ユニットサイド) パソコン:


撮影画像を見たり、口腔内カメラ撮影をするパソコンでデンタル撮影を行う場合もあります。

- 補足1: パソコンによっては下記のような画面が表示されます。「はい」をクリックして進んでください。





下記の画面が表示される場合は「ドットNET3.5」の追加が必要となります。
ソフトダウンロードページの下段

>> 詳しくはこちら をクリックして手順に従ってください。

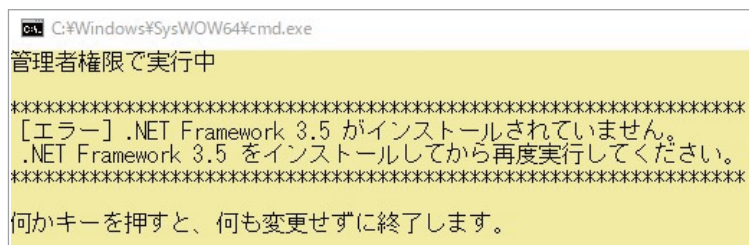

- 補足2: 下記のような画面が表示される場合は「詳細情報」をクリック後、「実行」をクリックしてください。

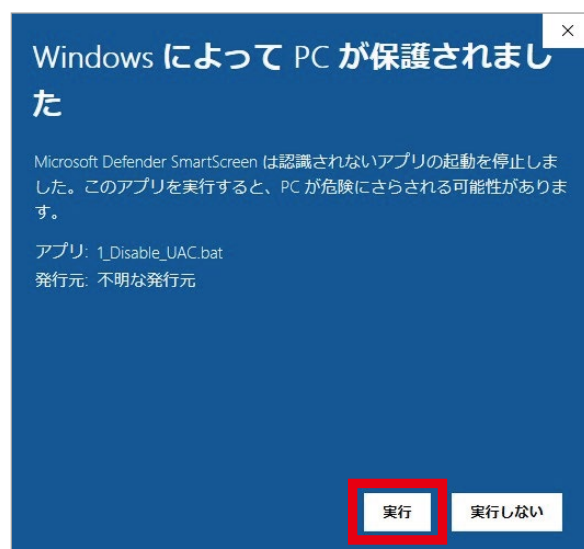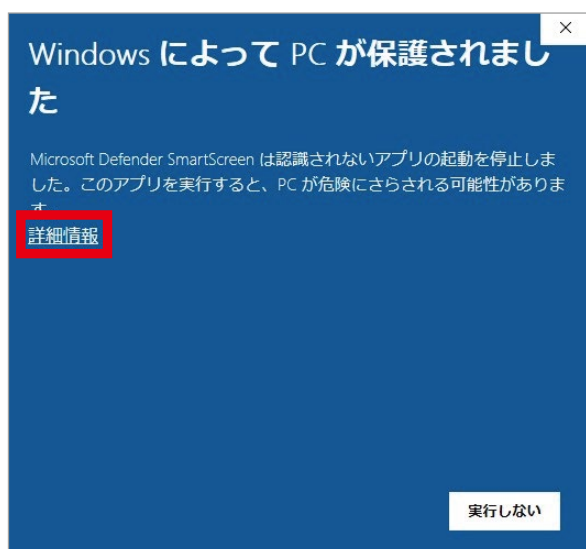


手順⑤: ※**サーバーパソコン(親機)を選択している場合**で、下記に該当する場合は
データベース初期設定ツールが起動しますのでデータベースの設定も行ってください。

- ・ **初めて医科NEXTをインストールする場合**
- ・ **現在、医科NEXTをご利用中の場合**

データベースの設定を行ってください。


(表示されない場合は、すでに設定済みです。)

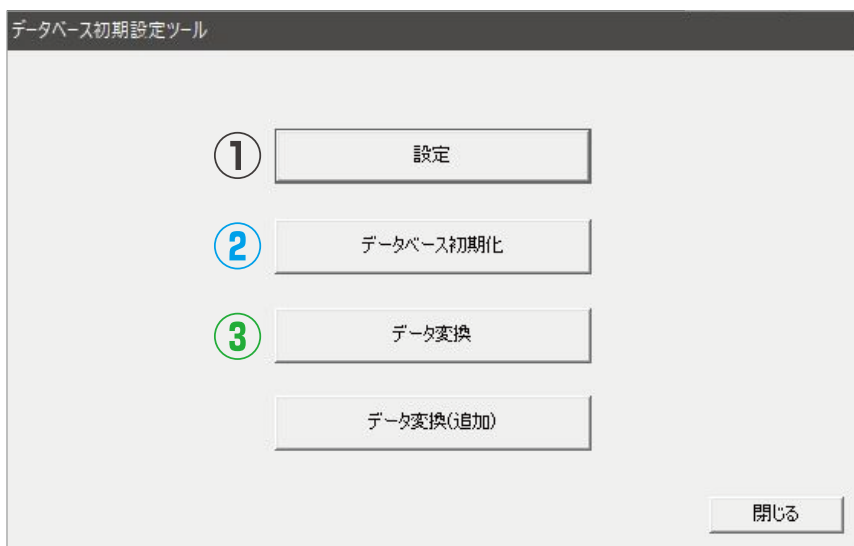

〈データベース設定1〉 共通の設定

① **設定** をクリックします。

設定画面内の内容は変更せず、「OK」をクリックします。

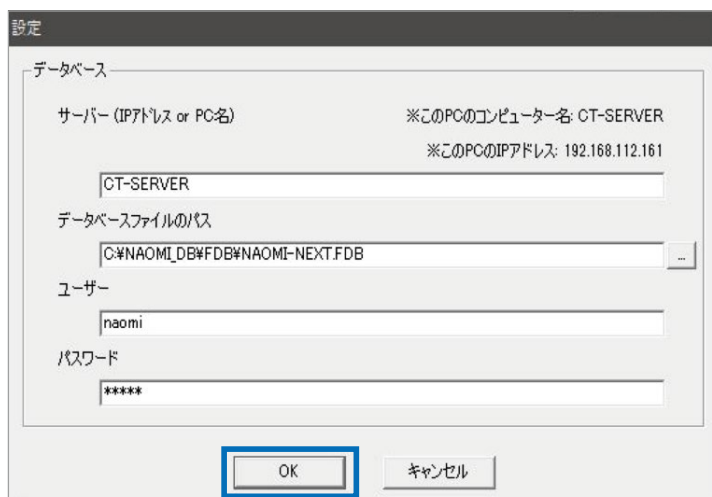


以下のいずれか該当する設定を行ってください。

- ・ **初めて医科NEXTをインストールする場合** → 〈データベース設定2〉へ
- ・ **現在、医科NEXTをご利用中の場合** → 〈データベース設定3〉へ


〈データベース設定2〉 初めて医科NEXTをインストールする場合

② データベース初期化 をクリックします。

「開始」をクリックします。

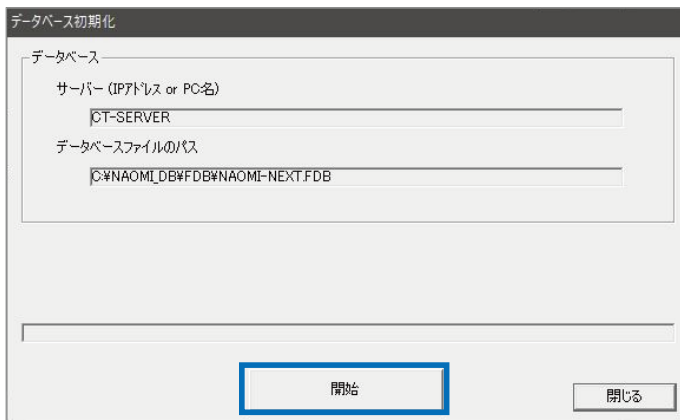

"データベースの初期化が完了しました"と表示されたら「OK」をクリックします。

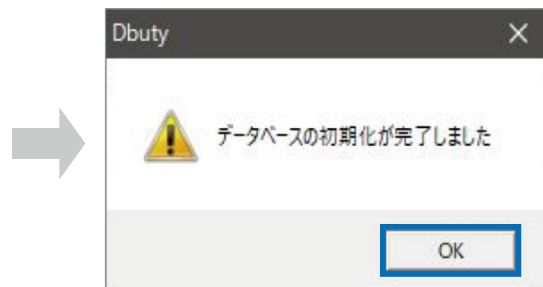

データベース初期設定ツールを「閉じる」をクリックし終了してください。


〈データベース設定3〉 現在、医科NEXTをご利用中の場合

③ データ変換 をクリックします。

「開始」をクリックします。



"変換が終了しました"と表示されたら「OK」をクリックします。

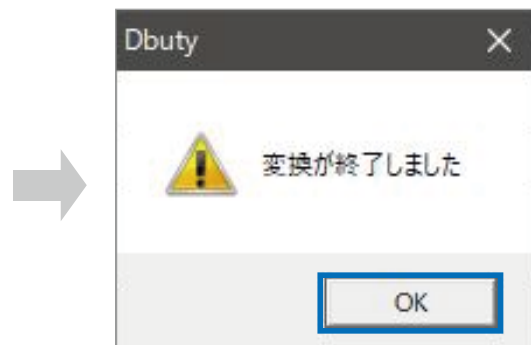


データ変換の画面は「閉じる」をクリックし終了してください。

データベース初期設定ツールも「閉じる」をクリックし終了してください。

- 手順⑥： 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。
画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。



- 手順⑦： 「戻る」をクリック後に「ツールを終了する」をクリックし、インストーラー 1 の作業は完了です。

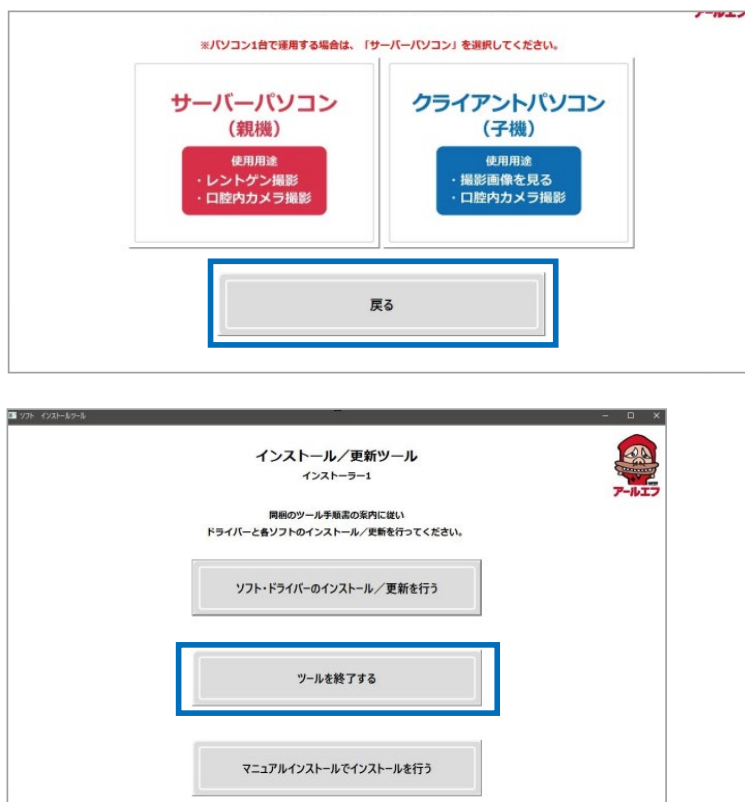

※CT撮影を行っているサーバーパソコン、CT画像を開覧しているクライアントパソコンは
手順⑧をとばし、**インストーラー 2 (P.8)** の手順を行ってください。



- 手順⑧： パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。
※ 撮影方法は取扱説明書をご参照ください。
※ Windows7をご使用の場合は、Wi-Fi受信機のドライバーが自動でインストールされません。
付属の「Wi-Fi受信機 & NEXTソフト取扱説明書」トラブルシューティング (P.25) を参照
いただきドライバーをインストールしてください。

初めてご使用になるパソコンではソフト起動時に設定が必要となります。
サポートセンター「0120-877-191」にお問い合わせください。


■ インストーラー 2

手順①: 「インストーラー 1」(P.3) と同じ流れで「インストーラー 2」のフォルダを開き進めてください。
USBメモリ内「インストーラー 2」をダブルクリック ⇒ 「Start.hta」もダブルクリック
⇒ ソフトインストールを選択 ⇒ 親機:子機を選択

手順②: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。
画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。

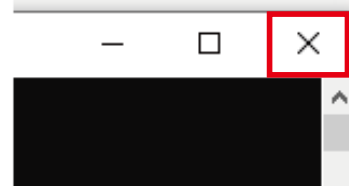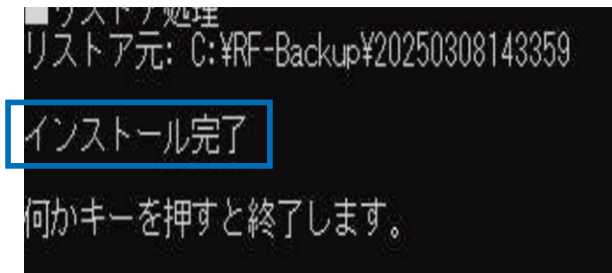

ポイント インストール中に確認メッセージが表示される場合は
下記画像と同じように「はい」・「OK」・「Yes to All」のいずれかをクリックし進めてください。

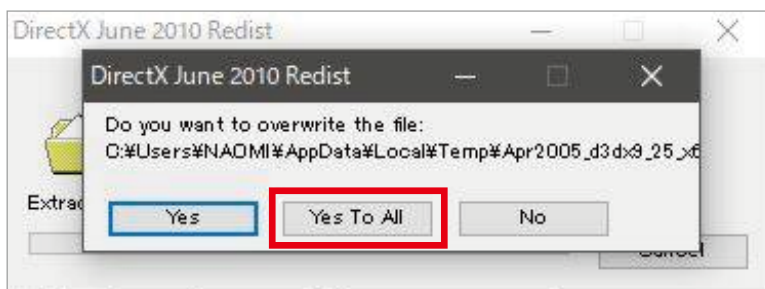

再起動しても良ければ、下記のメッセージで「はい」を選択してください。
※選択するとすぐにパソコンが再起動されます。



手順③: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。
※撮影方法は取扱説明書をご参照ください。