

【Wi-Fi対応】口腔内カメラ (Wi-Fi lumica) ソフト・受信機ドライバーインストール(ダウンロード)手順

歯科



※対応OS: Windows7～11

はじめに

USBメモリ(カメラソフトインストーラー入り )をお持ちの場合は
「**○インストール手順(P.2)**」からご対応ください。

無い場合は、下記の手順でアールエフのホームページからダウンロードしてください。

注意

- ・カメラをご使用前に、必ず本紙手順でソフトウェアのインストールを行ってください。
- ・画像閲覧ができなくなる場合がありますので、**カメラ使用の有無を問わずアールエフのソフトをご使用中の全てのパソコンでインストールを行ってください。**
- ・他社サーバーパソコンにはインストールしないでください。
- ・ソフトのインストールにあたり生じた不具合については、当社ではその責任を負いません。

○ダウンロード手順 インストーラー入りUSBがない場合

1. 検索サイトで「アールエフ」と検索、またはブラウザにアドレス「https://rfsystemlab.com/」を入力します。
2. ホームページ中段の **製品サポートはこちら 電話の前に☎** をクリックし、「簡単サポート」ページへ移動します。
3. 開いたページ下段ソフトダウンロードより「**【Wi-Fi対応】口腔内カメラ・受信機用ドライバー**」をクリックしダウンロードページへ移動します。



【Wi-Fi対応】口腔内カメラ 受信機用ドライバー

4. 歯科 DPXソフト用の

「**・歯科 ドライバー & ソフト インストーラー 1 ダウンロード**」をクリックしてダウンロードを行ってください。

※アールエフのCTをお使いの場合は「**・歯科 ドライバー & CTソフト インストーラー 2**」もダウンロードしてください。

〈歯科 DPXソフト用〉

・インストール手順 (PDF)




・**歯科 ドライバー&ソフト インストーラー1 ダウンロード** (zipファイル: 1.3GB)

・**歯科 ドライバー&CTソフト インストーラー2 ダウンロード** (zipファイル: 3.8GB)


エッジ  または Google クローム  をご使用の場合は「**ダウンロードフォルダ**」へ保存されます。

※お使いのブラウザソフトにより操作が異なる場合があります。

5. 「PC」を開き「ダウンロード」をクリック ⇒  インストーラー 1」を右クリックし「**すべて展開(T)...**」を選択します。
※パソコンにより表示項目や形が異なります

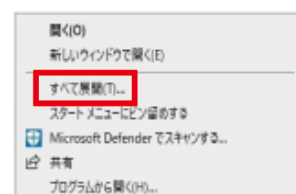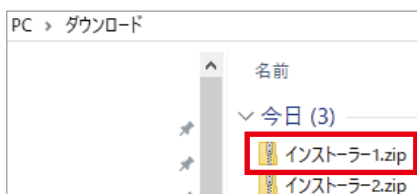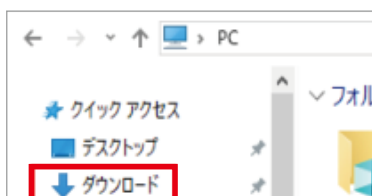

6. 開いてくる画面「圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開」画面内、「展開 (E)」をクリックしてください。

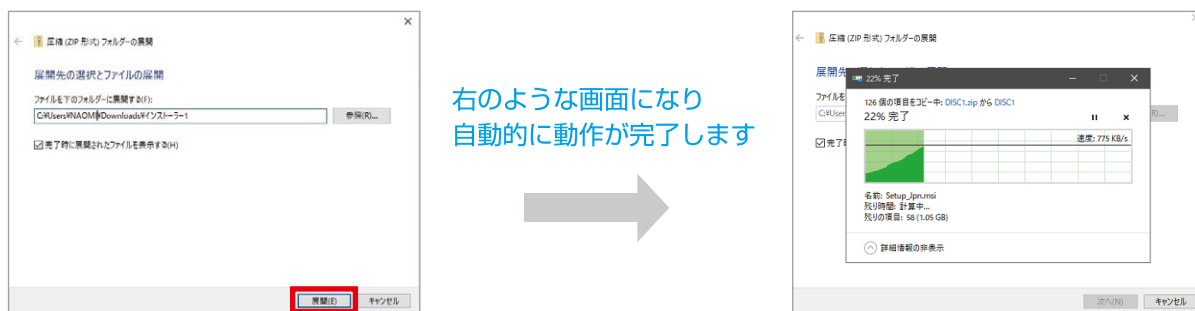


7. 展開後、表示されたフォルダ内の「インストーラー 1」をダブルクリックしてフォルダの中身が表示されたら下記「インストール手順」の手順②から進めてください。
8. CTをお使いの場合は「インストーラー 2.zip」も「ダウンロード手順 5 ～ 7」までと同様に進めてください。

○インストール手順 (あらかじめUSBメモリをパソコンに挿しておいてください)


※操作案内時の画面の表示は、パソコンによって異なる場合があります

■ インストーラー 1

- 手順①: 「PC」から「RF-USB」を開き、「インストーラー 1」を開きます。

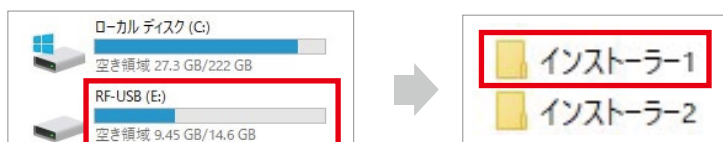

- 手順②: 「start.hta」をダブルクリックしてソフトを起動します。 ※下記のような画面が表示される事があれば「実行 (R)」をクリックして進めてください

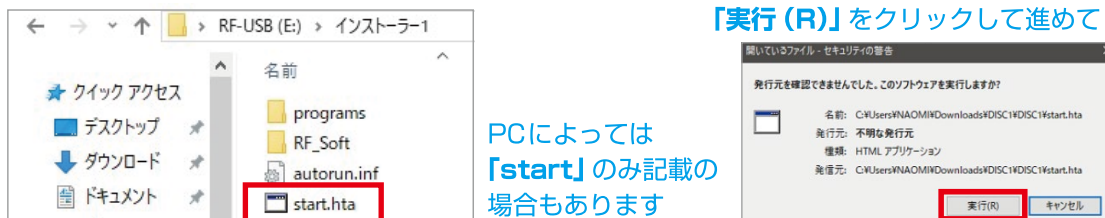

- 手順③: 起動した画面から「ソフト・ドライバーのインストール/更新を行う」をクリックしてください。



- 手順④: 「サーバーパソコン(親機)」または「クライアントパソコン(子機)」をクリックしてください。



サーバーパソコン(親機):
アールエフの製品をご使用中の場合はCT及びパノラマ撮影を行うパソコンが該当します。それ以外の環境の場合は、データを保存するパソコンをサーバーとして設定してください。


クライアント(ユニットサイド) パソコン:
撮影画像を見たり、口腔内カメラ撮影をするパソコンでデンタル撮影を行う場合もあります。

●補足1: パソコンによっては下記のような画面が表示されます。「はい」をクリックして進んでください。





下記の画面が表示される場合は「ドットNET3.5」の追加が必要となります。ソフトダウンロードページの下段



>> 詳しくはこちら をクリックして手順に従ってください。

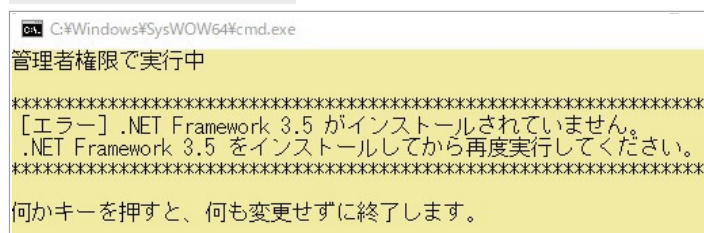


●補足2: 下記のような画面が表示される場合は「詳細情報」をクリック後、「実行」をクリックしてください。

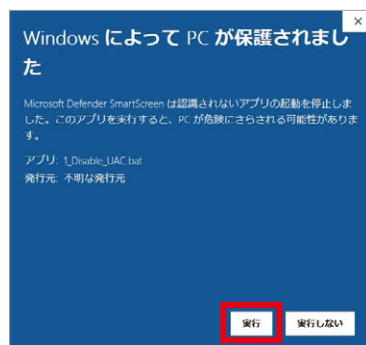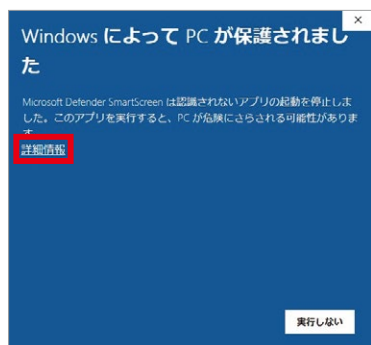

手順⑤: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。

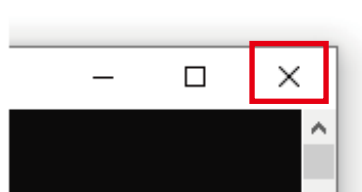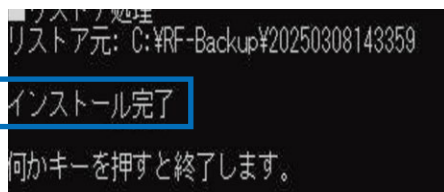


手順⑥: 「戻る」をクリック後に「ツールを終了する」をクリックし、インストーラー 1 の作業は完了です。

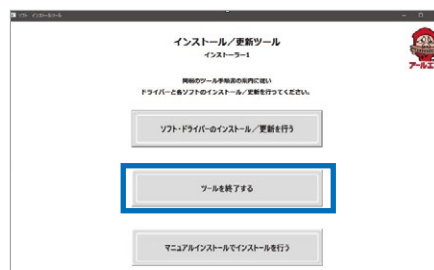

※CT撮影を行っているサーバーパソコン、CT画像を開覧しているクライアントパソコンは
手順⑦をとばし、■インストーラー 2 (P.4) の手順を行ってください。

手順⑦: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。

※ 専用化されていないパソコンの場合、右記
NDSソフトアイコンをダブルクリックし
ソフトを起動させます。

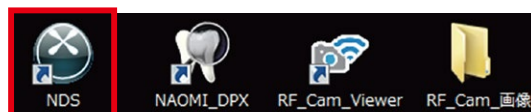

※ 撮影方法は「Wi-Fi受信機&DPXソフト取扱説明書」をご参照ください。

※ Windows7をご使用の場合は、Wi-Fi受信機のドライバーが自動でインストールされません。
付属の「Wi-Fi受信機&DPXソフト取扱説明書」トラブルシューティング (P.23) を参照
いただきドライバーをインストールしてください。

初めてNDSソフトをご使用になるパソコンでは起動時にIPアドレス設定が必要となります。
サポートセンター「0120-877-191」にお問い合わせください。


■ インストーラー 2

手順①: 「インストーラー 1」(P.2下段)と同じ流れで「インストーラー 2」のフォルダを開き進めてください。
USBメモリ内「インストーラー 2」をダブルクリック ⇒ 「Start.hta」もダブルクリック
⇒ ソフトインストールを選択 ⇒ 親機:子機を選択

手順②: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。
画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。



ポイント インストール中に確認メッセージが表示される場合は
下記画像と同じように「はい」・「OK」・「Yes To All」のいずれかをクリックし進めてください。

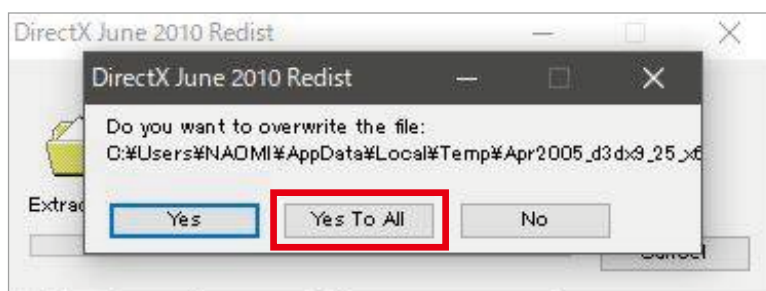

再起動しても良ければ、下記のメッセージで「はい」を選択してください。
※選択するとすぐにパソコンが再起動されます。



手順③: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。
※撮影方法は「Wi-Fi受信機&DPXソフト取扱説明書」をご参照ください。