

Wi-Fi ワイヤレス口腔内カメラ (Wi-Fi lumica)



ソフト・ドライバーインストール手順

※対応OS: Windows7~11

注意: カメラをご使用前に、必ず下記手順でソフトウェアのインストールを行ってください。

画像閲覧ができなくなる場合がありますので、**カメラ使用の有無を問わず**

アールエフのソフトをご使用中の全てのパソコンでインストールを行ってください。

はじめに: USBメモリ(カメラソフトインストーラー入り)をお持ちの場合は、

次ページ「◎インストール手順」からご対応ください。



無い場合は、下記手順でアールエフのホームページからダウンロードしてください。 **USBメモリ**


※ USBメモリは口腔内カメラ**初回販売時のみ**同梱されます。

○ ダウンロード手順

1. ブラウザにアドレス「<https://rfsystemlab.com/>」を入力、または検索サイトで「アールエフ」と検索します。

2. ホームページ中段の **製品サポートはこちら 電話の前に** をクリックし、「簡単サポート」ページへ移動します。

3. 開いたページ下段ソフトダウンロードより**【Wi-Fi対応】口腔内カメラ・受信機用ドライバー**をクリックします。

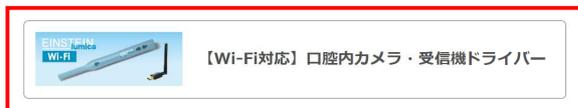

←ダウンロードページに移動します

4. 「**・ドライバー&ソフト - インストーラー1 ダウンロード**」をクリックしてダウンロードを行ってください。

・CTをお使いの場合は「**・ドライバー&ソフト - インストーラー2 ダウンロード**」もダウンロードしてください。

※お使いのブラウザソフトにより操作が異なる場合があります。


エッジ またはGoogleクローム をご使用の場合は「**ダウンロードフォルダ**」へ保存されます。

5. PCを開き「**ダウンロード**」をクリック ⇒ **インストーラー-1.zip** を右クリックし「**すべて展開(T)...**」を選択します。

※パソコンにより表示項目や形が異なります




6. 開いてくる画面「**圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開**」画面内、「**展開(E)**」をクリックしてください。

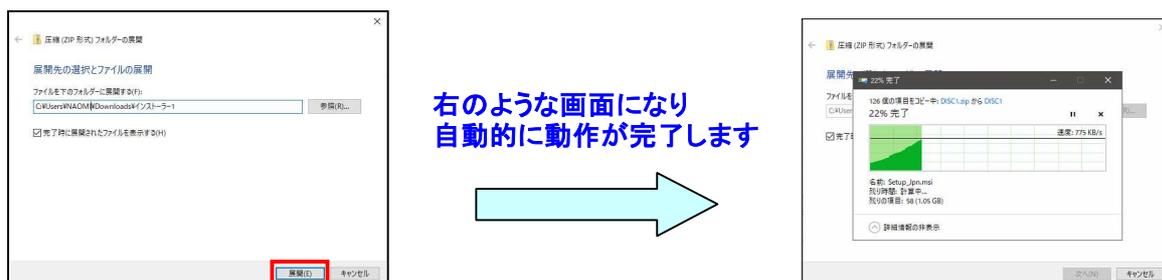

7. 展開後、表示されたフォルダ内の「インストーラー1」をダブルクリックして開きます。

8. 開いたフォルダ内の「start.hta」をダブルクリックしてソフトを起動します。

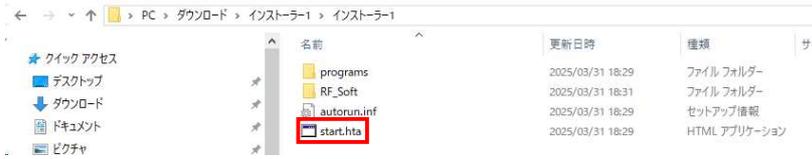

PCによっては「start」のみ記載の場合もあります。

9. 「ソフト インストールツール」が起動したら、下記の手順③から進めてください。



← この画面が表示されたら
下記の手順③へ


10. CTをお使いの場合は、**インストーラー2.zip**も手順「5」～手順「9」までと同様の流れで進めてください。

◎ インストール手順（あらかじめUSBメモリをパソコンに挿しておいてください）


※ 操作案内時の、画面の表示はパソコンによって異なる事があります。

■ インストーラー1

手順①: PCから「RF-USB」を開き ⇒ 「インストーラー1」を開きます。

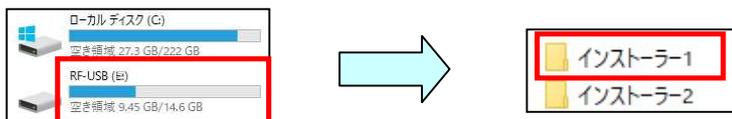

手順②: 「start.hta」をダブルクリックしてソフトを起動します。

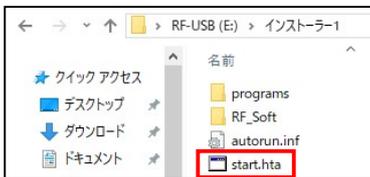

PCによっては
「start」のみ記載の
場合もあります。

※下記のような画面が表示される事があれば、
「実行(R)」をクリックして進めてください。



手順③: 起動した画面から「ソフト・ドライバーのインストール/更新を行う」をクリックしてください。




手順④: 「サーバーパソコン(親機)」または「クライアントパソコン(子機)」をクリックしてください。



サーバーパソコン(親機):
レントゲン撮影や口腔内カメラ撮影

クライアント(ユニットサイド)パソコン:
撮影画像を見る、口腔内カメラ撮影


●補足: 下記のような画面が表示される場合は「詳細情報」をクリック後、「実行」をクリックしてください。

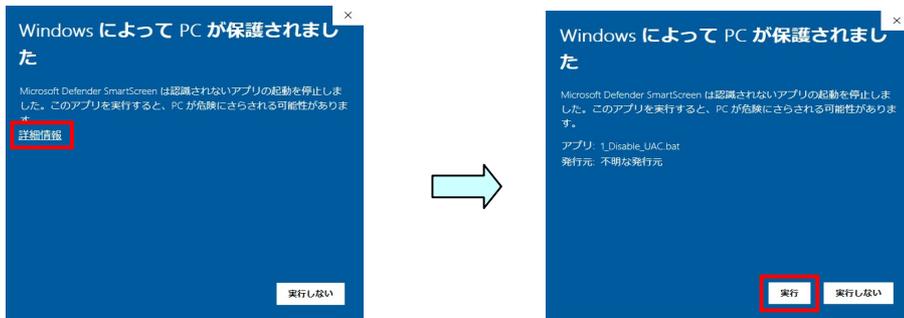

手順⑤: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。
画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。



手順⑥: 「戻る」をクリック後に「ツールを終了する」をクリックし、インストーラー1の作業は完了です。

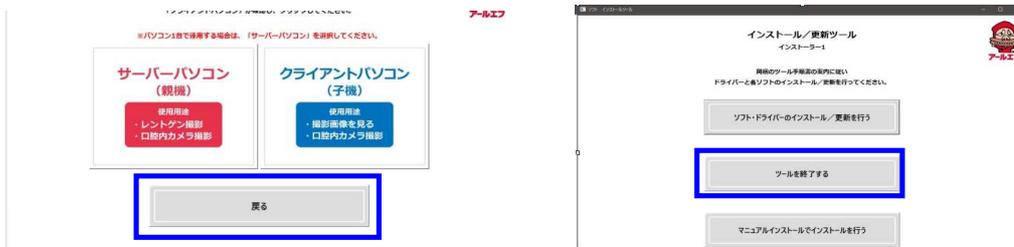

※ CT撮影を行っているサーバーパソコン、CT画像を閲覧しているクライアントパソコンは
手順⑦をとばし、下記の「インストーラー2」の手順を行ってください。

手順⑦: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。

※ 撮影方法は取扱説明書をご参照ください。

※ Windows7 をご使用の場合は、Wi-Fi受信機のドライバーが自動でインストールされません。
付属の「Wi-Fi受信機 & DPXソフト取扱説明書」トラブルシューティング
P23を参照いただきドライバーをインストールしてください。

■ インストーラー2


手順①: 2ページ目下段「インストーラー1」と同じ流れで「インストーラー2」のフォルダを開き進めてください。

USBメモリ内「インストーラー2」を開く ⇒ 「Start.hta」を開く
⇒ ソフトインストールを選択 ⇒ 親機:子機の選択

手順②: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。
画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。
※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。



ポイント インストール中に確認メッセージが表示される場合は、
下記画像と同じように「はい」・「OK」・「Yes to All」のいずれかをクリックし進めてください。

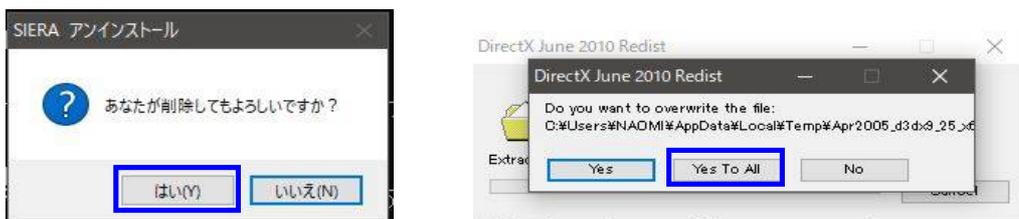

再起動しても良ければ、下記のメッセージで「はい」を選択してください。
※選択するとすぐにパソコンが再起動されます。



手順③: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。
※撮影方法は取扱説明書をご参照ください。

アールエフ サポートセンター
TEL ☎ 0120-877-191

受付時間 / 【月～土】 8:30～18:00 【日・祝】 11:00～18:00
※受付時間外は、FAX / E-mail (24時間受付) をご利用ください
FAX:0120-977-232 E-mail: support1@rfsystemlab.com



【Wi-Fi lumica】ソフト・ドライバインストール手順250402