

【Wi-Fi対応】 口腔内カメラ (Wi-Fi lumica)

ソフト・受信機ドライバーインストール(ダウンロード)手順



※対応OS: Windows7～11

はじめに: USBメモリ(カメラソフトインストーラー入り)をお持ちの場合は、

次ページ「◎インストール手順」からご対応ください。

無い場合は、下記手順でアールエフのホームページからダウンロードしてください。

※USBメモリは【Wi-Fi対応】口腔内カメラ**初回販売時のみ**同梱されます。



USBメモリ



注意: ・カメラをご使用前に、必ず下記手順でソフトウェアのインストールを行ってください。

・画像閲覧ができなくなる場合がありますので、**カメラ使用の有無を問わず**

アールエフのソフトをご使用中の全てのパソコンでインストールを行ってください。

・他社サーバーパソコンにはインストールしないでください。

・ソフトのインストールにあたり生じた何らかの不具合については、当社ではその責任を負いません。

○ ダウンロード手順

1. 検索サイトで「アールエフ」と検索、またはブラウザにアドレス「<https://rfsystemlab.com/>」を入力します。

2. ホームページ中段の **製品サポートはこちら 電話の前に☎** をクリックし、「簡単サポート」ページへ移動します。


3. 開いたページ下段ソフトダウンロードより「【Wi-Fi対応】口腔内カメラ・受信機用ドライバー」をクリックします。



←ダウンロードページに移動します

4. 「・ドライバー&ソフト - インストーラー1 ダウンロード」をクリックしてダウンロードを行ってください。

※アールエフのCTをお使いの場合は「・ドライバー&ソフト - インストーラー2」もダウンロードしてください。

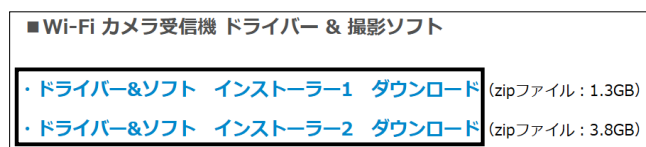


エッジ またはGoogleクローム をご使用の場合は「ダウンロードフォルダ」へ保存されます。

※お使いのブラウザソフトにより操作が異なる場合があります。

5. PCを開き「ダウンロード」をクリック ⇒ インストーラー1」を右クリックし「すべて展開(T)…」を選択します。


※パソコンにより表示項目や形が異なります

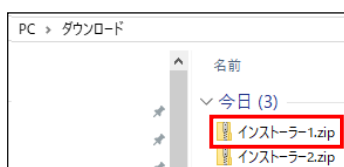

6. 開いてくる画面「圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」画面内、「展開(E)」をクリックしてください。



右のような画面になり
自動的に動作が完了します

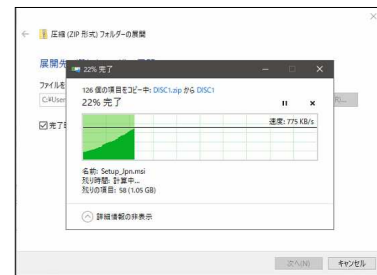

7. 展開後、表示されたフォルダ内の「インストーラー1」をダブルクリックしてフォルダの中身が表示されたら下記「インストール手順」の手順②から進めてください。




8. CTをお使いの場合は「インストーラー2.zip」も「ダウンロード手順 5～7」までと同様に進めてください。

◎ インストール手順 (あらかじめUSBメモリをパソコンに挿しておいてください)


※ 操作案内時の画面の表示は、パソコンによって異なる事があります

■ インストーラー1

手順①: PCから「RF-USB」を開き ⇒ 「インストーラー1」を開きます。

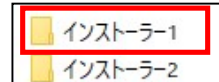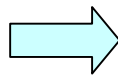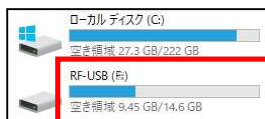

手順②: 「start.hta」をダブルクリックしてソフトを起動します。

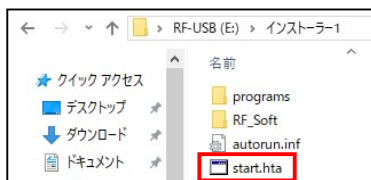

PCによっては
「start」のみ記載の
場合もあります


※下記のような画面が表示される事があれば、
「実行(R)」をクリックして進めてください



手順③: 起動した画面から「ソフト・ドライバーのインストール/更新を行う」をクリックしてください。



手順④: 「サーバーパソコン(親機)」または「クライアントパソコン(子機)」をクリックしてください。

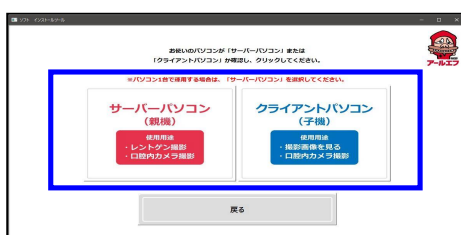

サーバーパソコン(親機):

RFの製品をご使用中の場合は
CT及びパノラマ撮影を行うパソコンが
該当します、それ以外の環境の場合は、
データを保存したいパソコンを
サーバーとして設定してください。

クライアント(ユニットサイド)パソコン:

撮影画像を見たり、口腔内カメラ撮影をする
パソコンですが、デンタル撮影を行う場合もあります。


●補足1: パソコンによっては下記のような画面が表示されます、「はい」をクリックして進んでください。





下記の画面が表示される場合は「ドットNET3.5」の追加が必要となります。ソフトウェアダウンロードページの下段

[>> 詳しくはこちら](#)

をクリックして手順に従ってください。

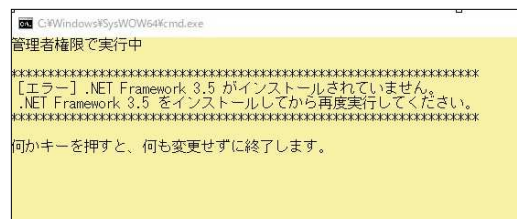


●補足2: 下記のような画面が表示される場合は「詳細情報」をクリック後、「実行」をクリックしてください。

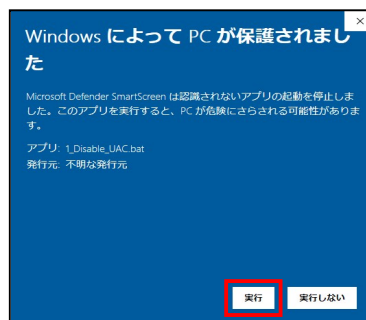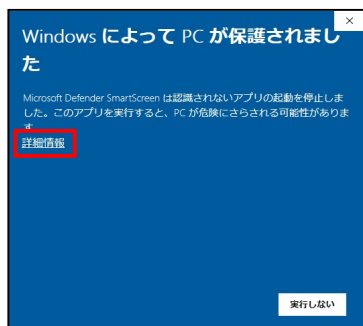

手順⑤: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。

画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。

※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。

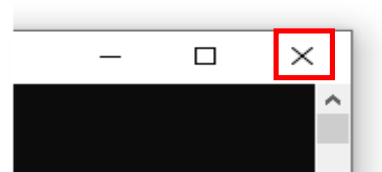

手順⑥: 「戻る」をクリック後に「ツールを終了する」をクリックし、インストーラー1の作業は完了です。



※ CT撮影を行っているサーバーパソコン、CT画像を閲覧しているクライアントパソコンは
手順⑦をとばし、下記の「インストーラー2」の手順を行ってください。

手順⑦: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。

※ 撮影方法は取扱説明書をご参照ください。

※ Windows7 をご使用の場合は、Wi-Fi受信機のドライバーが自動でインストールされません。

付属の「Wi-Fi受信機 & DPXソフト取扱説明書」トラブルシューティング

P23を参照いただきドライバーをインストールしてください。

●注意: 初めてご使用になるパソコンではソフト起動時に設定が、必要となります。

お手数おかけしてすみませんが、サポートセンター「0120-877-191」にお問合せください。

■ インストーラー2

手順①: 2ページ目下段「インストーラー1」と同じ流れで「インストーラー2」のフォルダを開き進めてください。


USBメモリ内「インストーラー2」をダブルクリック ⇒ 「Start.hta」もダブルクリック

⇒ ソフトインストールを選択 ⇒ 親機:子機を選択

手順②: 黒い画面(コマンドプロンプト)が起動し、インストール動作が開始されます。



画面内に「インストール完了」のメッセージが表示されたら終了となります。

※キーボードで何かキーを押すか、右上の×をクリックして終了してください。

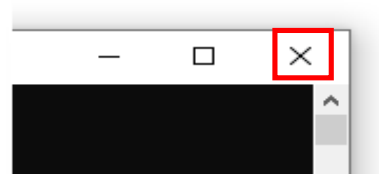


ポイント

インストール中に確認メッセージが表示される場合は、
下記画像と同じように「はい」・「OK」・「Yes to All」のいずれかをクリックし進めてください。

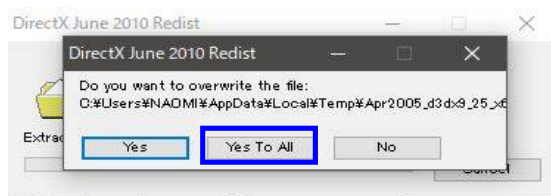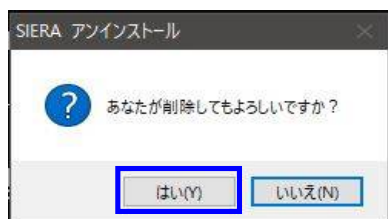

再起動しても良ければ、下記のメッセージで「はい」を選択してください。

※選択するとすぐにパソコンが再起動されます。

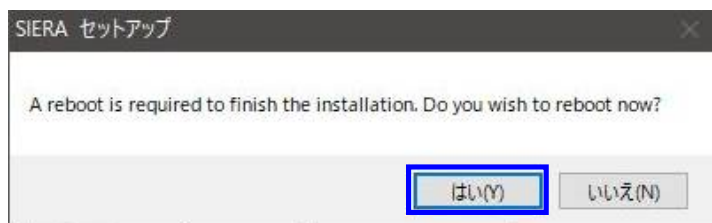

手順③: パソコンを再起動し、Wi-Fi受信機をパソコンのUSBポートへ接続してください。

※撮影方法は取扱説明書をご参照ください。

アールエフ サポートセンター

TEL ☎ 0120-877-191

受付時間 / 【月～土】 8:30～18:00 【日・祝】 11:00～18:00

※受付時間外は、FAX / E-mail (24時間受付) をご利用ください

FAX: 0120-977-232 E-mail: support1@rfsystemlab.com



【Wi-Fi lumica】ソフト・ドライバインストール手順250611