

# IPプレートの取り扱いについて

## ■ 注意点

IPプレートは光に感光するだけでなく、  
X線にも反応し、感光します。  
**X線室外で保管**いただくようお願いします。

※IPプレートが感光すると画質が落ち、  
右記の様な画像になります。



### 【光を当てないスキャン方法】

下記のように、蛍光灯などの光を当てないように  
スキャンを行います

※ディスクカバーは裏表に注意（印刷面は撮影できません）

撮影面



裏面



- ① 光が当たらないように撮影面を下にして開封
- ② 取り出したらすぐトレーに置く
- ③ トレーに置いたらすぐに挿入



### 〈注意!!〉 IPセット方法

位置や表／裏を誤ると、画像を正常に取得できません  
青い面を上向きに、トレーのマーキングに沿って置いてください



IPの表/裏が逆になっている



正しい位置にIPをセットしていない



正しい位置にIPをセットしていない



ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら