



# PCとスキャナーの通信が上手く行われず、画像がPCへ取り込まれなかった場合

## ■ 過去にスキャンした画像の再取り込み手順

1. スキャンする時の画面を立ち上げてください。
2. 『過去画像データ一覧』ボタンを右クリック

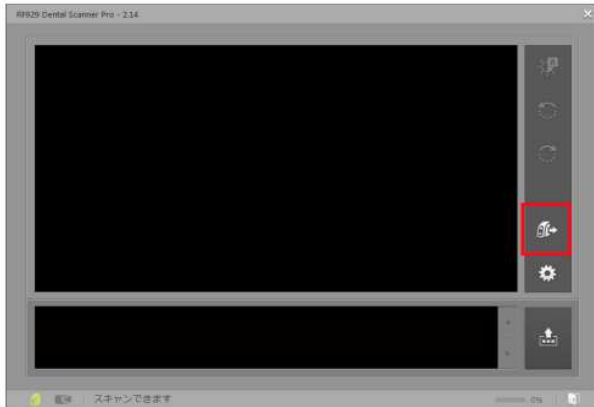

3. 過去データ一覧が表示されます。（※最新99枚まで。古い日付の画像から順に上書きされます）  
スキャン日時より対象の画像を左クリックで選択し、『ダウンロード』ボタンを左クリックします。  
（「スキャン日時」を2回左クリックで、最新の画像データが1番上に表示されます）

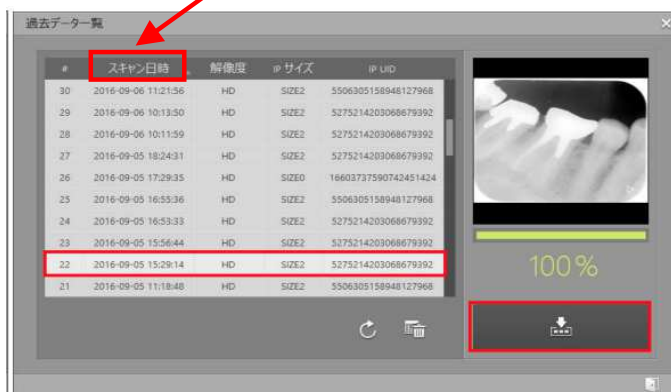

4. 取り込む画面に画像が表示されます。  
取り込む画像で間違いなければ、『送信』ボタンを左クリックします。



5. 以降は、通常の入込と同じ手順になります。

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

[お問い合わせはこちら](#)