

バッテリーの充電について

- ・バッテリー残量は本体の電池残量表示部分に表示されます。
- ・約2時間で満充電になります。
- ・満充電で最大100回以上のX線照射が可能です。
(ご使用条件により使用可能回数は変動します)
- ・残量が少なくなるとモニターに「B. EMPTY」と表示されます。




【充電手順】

①のOFFボタンを押して電源を切ります。



充電の際は、以下の点をご確認ください。

- ・照射器本体、充電ケーブル、コンセントが、すべて接続されていること。
- ・充電ケーブルのLEDランプが赤色に点灯していること。

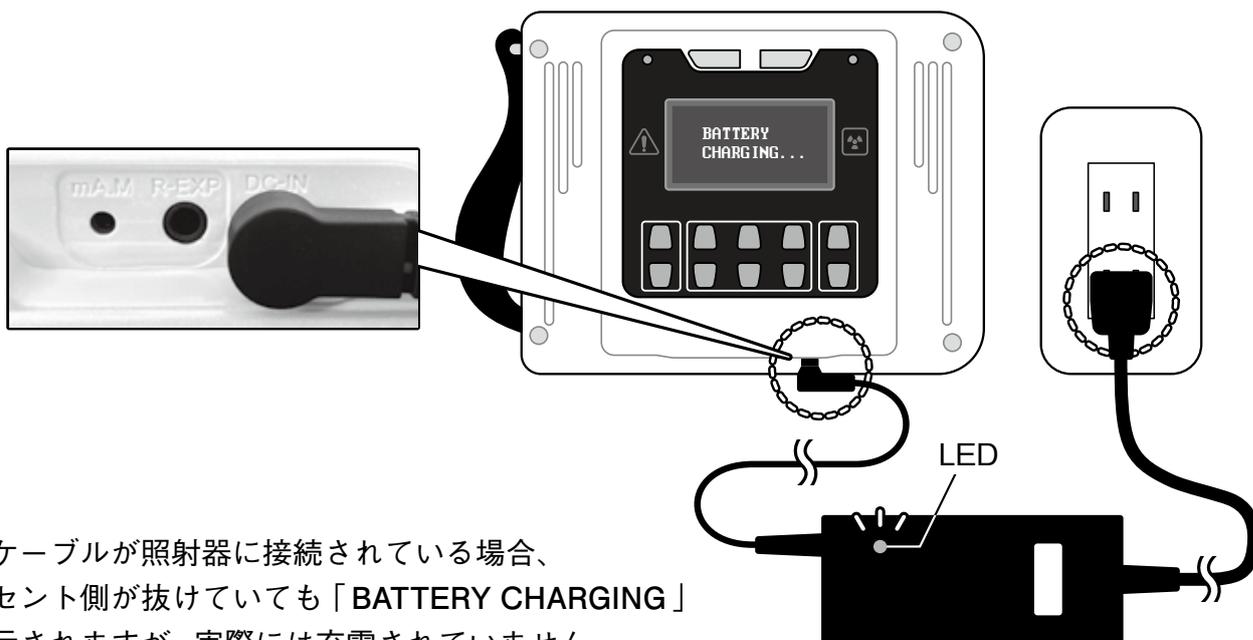

※充電ケーブルが照射器に接続されている場合、コンセント側が抜けていても「BATTERY CHARGING」と表示されますが、実際には充電されていません。



禁止

付属品の充電ケーブル以外を接続しないでください。



注意

3ヶ月以上バッテリーを使わない場合、バッテリーの劣化が著しくなります。充電は最低2ヶ月に1度行うことを推奨します。