

トラブルシューティング

エラーが発生すると下記メッセージが表示されます。

エラーメッセージ	対応策
BU TIMER	設定された秒数、X線が照射されませんでした。 照射が完了するまで、照射ボタンをしっかりと押し続けてください。
OVER HT	オーバーヒートを起こしました。電源をOFFにして30分お待ちください。
B.EMPTY	電池残量が少なくなっています。十分に充電してください。
HARD ERR	ハードウェアエラーが発生しています。 電源を一旦OFFにして、再度ONにしてください。
FILA CUT	X線管に異常が発生しました。 直ちに使用を中止し、サポートセンターへご連絡ください。
LOW KV/HIGH KV	適正な管電圧が出ていません。サポートセンターへご連絡ください。
LOW MA/HIGH MA	適正な管電流が出ていません。サポートセンターへご連絡ください。
BATTERY CHARGING	充電ケーブルが接続されています。充電ケーブルを抜いてください。 ※充電ケーブルのコンセントプラグが抜けていても表示が出ます。
症状	対応策
充電できない	充電ケーブルのLEDが点灯しているか確認してください。
充電器のLEDが点灯しない	コンセントに再度接続しなおしてください。
X線を曝射できない	ハンドスイッチを再度接続しなおしてください。
設定ボタンが効かない	電源を一旦OFFにして、再度ONにしてください。

「対応策」を実施しても改善されないまたは、上記症状以外にも異常が確認されましたら、当社サポートセンターへご連絡ください。

点検・メンテナンス

■ 日常点検していただきたい点

- ・汚れは柔らかい乾いた布で拭いてください
- ・汚れがひどい時は水でぬらした布を固く絞ってから拭いてください
- ・アルコールの使用は問題ありませんが、洗剤類は使用しないでください

■ 定期的（2ヶ月毎）に点検していただきたい点

- ・充電は最低2ヶ月に1度行うことを推奨します
- ・ネジがはずれていないか、緩んでいないか
- ・本体、充電ケーブル、ハンドスイッチに割れやヒビが入っていないか
- ・充電ケーブル、ハンドスイッチ接続部にガタツキはないか
- ・モニターの表示に異常はないか
- ・各スイッチは正常に動作するか