

IDを間違えて撮影した場合

正しいIDに修正する場合

※撮影日は変更できません

前提条件

※事前に正しいIDを登録してください

例として「誤ID:5105」・「正ID:5106」とした場合の説明です

1. 誤ったIDを入力し、画像を表示



2. 管理アイコンをクリック



3. 変更したい画像を1回クリックし「情報変更」アイコンをクリック



4. 右側に変更後のIDを入力「変更」アイコンをクリック



誤

正

登録されている情報

ID: 5105

モード: デンタル

部位: 右上

6番

変更後

ID: 5106

ID入力

モード: デンタル

部位: 右上

6番

※部位修正の場合、右側に正しい部位を入力します

- ・IDを変更した画像が画面から消えた事を確認
- ・正しいIDに画像が入っていることを確認

画像を削除する場合

1. 管理モードで削除したい画像をクリック
色枠で囲われます



2. 「削除」アイコンをクリック



3. 「削除」ボタンをクリック
データベースに登録されている画像を削除します

元データから完全に削除されます

