


CT画像の患者情報を修正する方法

【CT画像の患者IDを変更する】

1. 情報変更したいCT画像を開き、左上の「CT情報編集」アイコンを左クリック

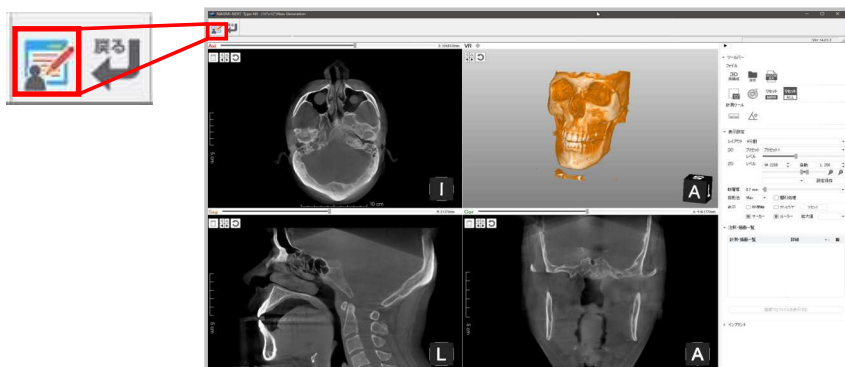

2. 「CT-Data情報編集画面」が出てきたら「変更後」の枠に変更したい情報および必要情報を入力、間違いがないことを確認し「登録」ボタンを左クリック

※ 変更しなくていい内容も入力が必要となります
入力しないで空欄のままだと、空欄が反映されます
例) 苗字だけ変更したい場合でも氏名のほか、ID、生年月日を入力します
(元々、入力していない場合は不要)

3. ID選択からCT画像を開き直し、再度「CT情報編集」を開き情報に変更されていることを確認してください

<変更前>

<変更後>